

GENU SYNCRO 2100

A térd természetes mozgását követő, szabályozható mozgásterjedelmű sínezettel ellátott térdrögzítő, amely nagyfokú térdizületi instabilitás, kereszt- vagy oldalszalag sérülések esetén ajánlott. Mint postoperatív rögzítő, a műtétet követően azonnal felhelyezhető, a gipszrögzítést is helyettesítheti, 3 pozícióban fixálható.

- * bőrrel érintkező felület: pamutborítású, bőrbarát syncrosoft
- * hossz: 59 cm, nyitott és zárt kivitel
- * 4 pár rugalmatlan tépőzár
- * többtengelyes ízületű sín
- * 50°, 70°, 90° és 110°, flexiós – és
- * 10°, 20° és 30° extenziós korlátozás lehetősége
- * 0°, 15°, 30° fixálási lehetőség
- * egyszerű beállítás stíftek segítségével



Genu Syncro 2100 Off



A térdrögzítő beállítása:

1. A térdrögzítő alsó-felső része az ízületsapkán lévő felirat szerint állapítható meg.
2. A sínek szakember által történő pontos lábhoz igazítása szükséges
3. A rögzítő felhelyezésekor figyeljen arra, hogy mindkét ízületsapkán lévő középvonaljelzés (Kniemitte) a **térdkalács középpontjának** magasságban legyen.

Tisztítás: A szivacsos anyagot a műanyaglapoktól és a sínezettől eltávolítva semleges mosószerrel, langyos vízben nyomkodással tisztítható. Kicsavarás nélkül fektetve szárítsa! Mosógépben való tisztítás nem ajánlott.



Genu Syncro 2100

Mellékhatások

Szakyszerű használat és viselés esetén a szervezet egészét érintő mellékhatások ez ideig nem ismertek. Azok a gyógyászati segédeszközök – sínek, ortézisek –, amelyeket kívülről a testfelszínre illesztünk, túlzottan szorosan felhelyezve bizonyos pontokon nyomási tüneteket okozhatnak vagy ritkán az ott futó ereket, idegeket összenyomhatják.

Ellenjavallatok

Beavatkozást igénylő túlérzékenység ez ideig nem ismeretes. Az alábbi betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések a rögzítendő területen, különösen gyulladáshoz vezető tünetek esetén. Ide tartoznak azok a felszakadt heggek is, melyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el.
4. Érzés- és keringéscsavarok, pld. cukorbetegség (diabetes mellitus)

Fontos tudnivalók

- A térdrögzítőt csak a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően és az ugyanott leírt alkalmazási területeken szabad használni.
- A terméket csak egy beteg kezelésének időtartamára tervezték.
- Szakszerűtlen használat esetén a termék szavatossága elvész.
- A terméken tilos bármiféle szakszerűtlen átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.
- Amennyiben szokatlan változásokat vesz észre magán (pld. a panaszok fokozódása), haladéktalanul keresse fel orvosát.
- Ha egy időben más terméket is (pld. kompressziós harisnyát) használna, azt előzetesen beszélje meg kezelőorvosával.
- Az ortézis főként mozgás során fejti ki hatását. Hosszabb pihenés idejére (pld. alvás, hosszabb ülés) le kell venni.
- A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok.
- Garanciát az érvényes törvényi rendelkezések alapján nyújtunk. Az elhasználódott terméket a háztartási szemétként dobhatja.

Körfogat cm-ben	MÉRETEK			
	Univerzális (2100 Off)	1	2	3
Körfogat a térdközépnél	30-53	30-37	37-43	43-53

EAN kód:

A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni szíveskedjen! **Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el.**



OTH Reg. szám: 36252/2002
 Gyártó/Forgalmaszó: LBT Kft.
 1134 Budapest, Dévai u. 11-13.
 Tel: 239-2282, Fax: 340-1309

Méret:	Oldal:
--------	--------

