

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4341

Állítható alumínium járóbot



1. Felhasználási terület

A B-4341 típusú állítható járóbot az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható. Olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható.

A bot állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) a szakorvos, vagy a gyógytornász tanácsa alapján történhet.

2. Jellemző méretek, adatok

A bot súlya: 0,35 kg
A bot rúd irányú terhelhetősége: max. 100 kg
Méret: 780 – 980 mm
Állíthatóság: 25 mm/fokozat

3. Használat

A B-4341 típusú állítható járóbot műanyag fogantyúval szerelt felsőrészébe teleszkóposan helyezkedik el az alsócső.

Az alsócső végére erősített botvéggumni a járást teszi biztonságossá.

A járóbot 9 magassági méretre állítható. A magassági fokozat a bot felső csővén található csapos külső rögzítőgyűrű kiemelésével, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után, a kívánt magassági mérethez tartozó furatba történő bepattintásával állítható be.

A járóbot használtánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy a forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni.

A járóbot optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat. Fontos a stabil tenyértámasz.

A botot mindig a jó oldali kézben fogva tesszük előre, ezután a sérült, gyenge, vagy fájós lábbal lépünk. Sose a fájós oldalon vigyük a botot, mert ezzel a járás ritmusát rontjuk. Fontos a szép járás, a jó járás.

Amennyiben két botra lenne szükség, a két botot tesszük előre, ezután a sérült, gyenge-, vagy fájós lábbal lépünk.

FIGYELEM!

- *A járóbotot sík, szilárd burkolatú járőfelületen lehet használni. A járőfelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.*
- *A járóbotot mindig függőleges helyzetben tartsa a bot terhelésekor. A ferdén tartott bot terhelés esetén deformálódhat, eltörhet és balesethez vezethet!*
- A magassági méret szabályzására szolgáló külső rögzítőgyűrű meghibásodása esetén a járóbotot nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- A markolat megrepedése esetén a bot nem használható, alkatrészt ki kell cserélni.
- A botvéggumit szétnyíródás, elkopás esetén ki kell cserélni! Billenés és csúszásveszély állhat fenn!
- Csak az előírt botvéggumi használható, belső méret Ø17 mm.
- A bot túlterhelése tilos, a járóbot elhajlásához, töréséhez vezet.

Alkatrészek beszerzése a termék vásárlási- vagy kiszolgálási helyén lehetséges

4. Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás

A botot karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet szükség esetén lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni.

A bot minden része a háztartásban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, illetve kezelhető.

4.2. Karbantartás

A bot rendszeres karbantartást nem igényel.

4.3. Tárolás

A járóbotot száraz, vízmentes helyen kell tárolni!

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált botot a fém hulladékgyűjtő helyeken lehet leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!