

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

REHAB Zrt.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A **MELORT** csoport tagja.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4350

Állítható háromlábú járóbot



1. Felhasználási terület

A B-4350 típusú állítható háromlábú járóbot, az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható. Olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. A bot állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.

2. Méretetek, adatok

Szélesség: 275 mm

Mélység: 215 mm

Magasság: 730-955 mm

Állíthatóság: 25 mm-es fokozatokban

Terhelhetőség: max. 100 kg testsúlyig

3. Használat

A magassági méret a bot felső csövén rugós rögzítő csap benyomásával, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintásával állítható be. A méret beállításához a felső csövön lévő recés anyát lazítsa ki, majd a mértet beállítás után húzza meg.

A bot jobb, vagy bal kézben való tarthatósága egyszerűen a fogantyút magába foglaló felső cső 180^o-kal történő elfordításával érhető el a rugós rögzítő csap benyomása utáni.

A járóbot használtánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni.

A járóbot optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat. Fontos a stabil tenyértámasz.

A botot mindig a jó oldali kézben fogva tegye előre, ezután a sérült, gyenge, vagy fájós lábbal lépjen. Sose a fájós oldalon vigye a botot, mert ezzel a járás ritmusát rontja.

Amennyiben két botra lenne szüksége, a két botot tegye előre, ezután a sérült, gyenge, vagy fájós lábbal lépjen.

FIGYELEM!

- *A járóbot sík, szilárd burkolatú járőfelületen lehet használni. A járőfelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.*
- A magassági méret szabályzására szolgáló bármelyik rögzítő elem meghibásodása esetén a járóbotot nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- A markolat megrepedése esetén a bot nem használható, alkatrészt ki kell cserélni.
- A járóbot támasztó lábainak elgörbülése egyensúlyvesztést eredményez! A bot nem használható – lábak szakmühelyben történő javítása szükséges..
- Botvéggumikat szétnyíródásuk, elkopásuk esetén ki kell cserélni! Billenés és csúszásveszély állhat fenn. Csak az előírt botvéggumi használható belső méret Ø 16 mm.
- A rugós rögzítő törése esetén a bot nem használható, alkatrész csere szükséges.
- A bot túl- vagy oldalirányú terhelése tilos, a járóbot elhajlásához, töréséhez vezethet, amely balesetet okozhat!

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

4. Karbantartás, tárolás

4.1. *Tisztítás*

A bot karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni.

A bot minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

4.2. *Karbantartás, tárolás*

A járóbot rendszeres karbantartást nem igényel. Vizes környezetben történő használat után a járóbotot célszerű szárazra törölni!

4.3. *Tárolás*

A járóbotot száraz vízmentes helyen kell tárolni!

4.4. *Megsemmisítés*

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált botot a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!