

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli.

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4372

Állítható alumínium könyökmankó



1. Felhasználási terület

Az állítható alumínium könyökmankó, mint gyógyászati segédeszköz az előírásoknak megfelelő méretbeállítással, szobai és utcai használatra alkalmas.

Az alsó végtag betegsége, vagy csonkolása esetén, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható.

A könyökmankó az egyszerű állítási lehetőségénél fogva a rehabilitáció során szükségessé váló változtatásoknak megfelelően használható, de az ismételt beállítása (átállítása) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.

Fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

2. Jellemző méretek, adatok

A mankó rúdirányú terhelhetősége:	max. 135 kg
A mankó súlya:	0,5 kg
Beállítható markolat magasság	760 – 960 mm
Állíthatóság:	25 mm-es fokozatokban

3. Használat

A könyökmankó használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) tanácsát kell figyelembe venni.

A könyökmankó használatakor a támasztást biztosító könyökmankót az elváltozásos alsóvégtaggal ellentétes oldali kézben kell viselni, és a járást úgy kell betanulni, hogy a könyökmankó és a beteg alsóvégtag egyszerre, azonos ideig legyen terhelve.

Beállítás:

A felhasználó méretének megfelelő magassági fokozat a könyökmankó külső csövén található csapos rögzítő-gyűrű kiemelésével (rugós csapos kivitelnél a csap benyomásával), majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintásával állítható be.

FIGYELEM!

- *A mankót sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.*
- *A mankót mindig függőleges helyzetben tartsa terhelésekor. A ferdén tartott mankó terhelés esetén deformálódhat, eltörhet és balesethez vezethet!*
- A magassági méret szabályzására szolgáló rögzítő gyűrű meghibásodása esetén az eszközt nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- A markolat és támasztó részek megrepedése esetén a mankó nem használható, alkatrészeket ki kell cserélni.
- A botvéggumit szétnyíródása, elkopása esetén ki kell cserélni! Billenés és csúszásveszély állhat fenn!
- A mankó túlterhelése tilos, a mankó elhajlásához és töréséhez vezethet!
- A terméket 50 C⁰-nál magasabb hőmérsékletnek kitenni TILOS!
- Lépcsőn fokozott figyelemmel közlekedjen!
- Hóban és jégen, vizes-csúszós felületen fokozott figyelemmel közlekedjen!

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

4. Karbantartás, tárolás

4.1 . Tisztítás

A mankó karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni.

A mankó minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

4.2. Karbantartás

A mankó rendszeres karbantartást nem igényel. Vizes környezetben történő használat után a mankót célszerű szárazra törölni!

4,3. Tárolás

A mankót száraz vízmentes helyen kell tárolni!

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált mankót a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!