

Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pávilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok	Tel:20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pácsirta u.1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pácsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax:76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u.83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755



**GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ
PRIMA-PROTETIKA KFT.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhátai út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

D-4263

Állítható, összecusukható járókeret

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szervíz, javítás stb.).

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segedeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

Nagykereskedelmi lerakat:

5600 Békéscsaba, Vandhátai út 1. Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.

PRIMA-PROTETIKA Kft.

„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

A tájékoztatót készítette: Droppa Éva
 Jóváhagyta: Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő
 A vásárlói tájékoztató kiadva: 2016. április 10.

Gyártási szám:

Megrendelő neve:

címe:

Megrendelő TAJ száma:

Termék átadásának kelte: 20..... év hó nap

Felíró orvos neve:.....

Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!

EAN kód címke:

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

1. Általános ismertetés

Az Ön által megrendelt eszköz az emberi test anatómiájának figyelembe vételével készült. Orvosi rendelvényre, társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján adható ki.

Segíti a bizonytalan, vagy járáshibás betegek helyváltoztatását, tehermentesíti a sérült, vagy gyenge alsó végtagot, növeli a biztonságérzetet. A készülék összecsucskható, ezért helyigénye kicsi, gépkocsiban könnyen szállítható.

2. Használat

Az állítható, összecsucskható járókeretet gyógyászati segédeszközként orvosi rendelvényre az előírt méretbeállítással kell használni. A járókeret magasság beállítása, illetve változtatása az orvos, vagy a szakember tanácsa szerint történjen.

A járókeret **magasság beállítását** (6 fokozatban 2,5 cm-enként) a következőképpen kell elvégezni mind a négy lábon:

* A lábak alsó, mozgatható szárát rögzítő műanyagrugós csap (klipsz) kiálló fém végét hüvelykujjal megnyomjuk, majd a botvég gumit megfogva kihúzzuk a mozgatható csőlabát.

* A mozgatható szárát szükség szerint tolvá vagy húzva beállítjuk a megfelelő magasságot.

* Ügyeljünk, hogy a mozgó részen és a befogadó csövön lévő furatok egy vonalba kerüljenek!

* Pattintsuk vissza a furatba az állítócsapot és rögzítsük a szorító gyűrűt.

A járókeret **összecsucskása, szétnyitása:**

A járókeret elején, felül elhelyezkedő teleszkópcső közepén található rögzítő gombot megnyomva, előbb az egyik, majd a másik oldalkeretet az első keret mellé zárjuk.

Nyitáskor elég a két oldalkeretet kifelé nyitni, mert a rögzítő gomb a helyére pattan és biztosítja azok fix helyzetét.

Figyelem! mind a négy láb egyforma magasságba legyen állítva!

Ajánlatos a járókeret megfelelő magasság beállítása után a járást gyógytornász vagy szakember utasítása alapján elkezdeni!

Figyelem! Síkos úton fokozott óvatossággal, kisebb lépéseket téve kell közlekedni! A járókeretre csak akkor szabad teljes terhelést helyezni, ha stabilan áll a talajon.

A járókeret különösebb karbantartást nem igényel. Az esetlegesen megkopott csúszásgátló botvég gumi cserélhető. Jobbra-balra csavargatva lehúzzuk a csőről a megkopott alkatrészt, és hasonló mozgattással rátoljuk az újat. a *Botvég gumi a kiszolgálás helyén megvásárolható.*

Figyelem! Rendeltetésellenes használatból, túlterhelésből, átalakításból, helytelen kezelésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, valamint a garancia nem érvényesíthető.

3. Műszaki leírás

A váz alumínium csőből és acélcső merevítésből áll.

A D-4263 összecsucskható, állítható magasságú járókeret egy méretben készül. A magasság állítása a lábak végeiben található állítócsövek kihúzásával, vagy betolásával történik. Az állítócsövek helyzetét a lábak, illetve az állítócsövek sugárirányú furataiba helyezett, a csőre pattintható műanyagfejbe ágyazott acél rögzítőcsapok biztosítják. Az illeszkedést műanyag vezető gyűrűk segítik.

Magasság:	785 mm-900 mm
Hossza:	485 mm
Szélesség:	565 mm
Saját tömeg:	2,7 kg.
Terhelhetőség:	100 kg

4. Tisztítás

A szennyezett felületeket háztartási tisztítószerral kell tisztítani. Mosás után tiszta vízzel öblítsük le és töröljük szárazra.

5. Minőségtanúsítás

EEKH regisztráció (029) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14

EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

OEP által támogatott termék.

6. Megfelelőségi nyilatkozat

Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkozatható alapvető követelmények mindegyikét.

Kedves vásárlónk!

Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!

.....