

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### RS-03 típusú állítható, összecusukható járókerethez



**Alkalmazás:** Az RS-03 magasságban állítható, összecusukható járókeret olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó végtagjuk tehermentesítése ilyen módon megoldható, valamint járás-biztonsága javítható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van. Különösképpen javasolt alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladás, bénulása esetén. A járókeretet az oldalsó

elemek, retesz kattánásáig történő, kihajtása után vesszük használatba. A magasság a járókeret felső csövein található csapos külső rögzítő gyűrű kiemelésével, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintással állítható be. A beállítást minden lábon egyformán kell elvégezni. Maximálisan 95 cm állítható be, felnőtt (kb. 150-185 cm) magasságához 6 fokozatban. A járókeret terhelhetősége: max. 90 kg.

**Használati útmutató:** A járókeret optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat. A járókeretet felemelve előre – nem túl messzire - tesszük, ezután rátámaszkodva lépünk. Síkos, pl. jeges úton, a járókerettel fokozott óvatossággal közlekedjünk! A botvég gumik a kiszolgálási helyen és gyógyászati segédeszköz üzletekben kaphatók.

**Tisztítás, tárolás:** Semleges mosószerrel, langyos vízzel lemosva, majd puha ruhával áttörölve. A járókeret jellegének megfelelően függőleges helyzetben, a középső nyomógomb lenyomása után az oldalsó elemek behajtását követően, sík padlózatra állítva ajánlatos tárolni.



A termék teljesíti orvostechikai eszközökre vonatkozó 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet előírásait. I. veszélyességi osztályú orvostechikai eszköz.

**Gyártó és forgalomba hozó:**



REX-SAN Kft., 1106. Budapest, Fehér út 10.  
Tel/Fax (06 1) 262-9829, web: [www.rex-san.hu](http://www.rex-san.hu)