

Szerviz egységek:**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224
 3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196; Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593

JÓTÁLLÁSI JEGY	
Eladószerzőtölti ki!	
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)	
Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3	Bejelentés időpontja: 3
Tipus: B-4264	Bejelentett hiba:
Gyártási szám:	Elhárított hiba leírása:
Kelt: 20..... hó nap	A jótállás új határideje:
Eladó aláírás (P.H.)	Munkalapszám:
	Kelt:
	20..... hó nap aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2	Bejelentés időpontja: 2
Tipus: B-4264	Bejelentett hiba:
Gyártási szám:	Elhárított hiba leírása:
Kelt: 20..... hó nap	A jótállás új határideje:
Eladó aláírás (P.H.)	Munkalapszám:
	Kelt:
	20..... hó nap aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1	Bejelentés időpontja: 1
Tipus: B-4264	Bejelentett hiba:
Gyártási szám:	Elhárított hiba leírása:
Kelt: 20..... hó nap	A jótállás új határideje:
Eladó aláírás (P.H.)	Munkalapszám:
	Kelt:
	20..... hó nap aláírás (P.H.)

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ****B-4264****Állítható lépegető járókeret**

Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

1. Felhasználási terület

A B-4264 lépegető járókeret, az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható. Olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állásjárásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van.

A járókeret állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.

2. Jellemző méretek, adatok

Tömeg: 3 kg
 Felhasználó max. megengedett tömege: 100 kg
 Méret: 760–960 mm
 Állíthatóság: 25,4 mm/fokozat

3. Használat

A magassági fokozat a járókeret lábészén található egy-egy rugós csap benyomásával, majd a két egymásba csúszo cső elmozdítása után a kívánt magassági mérethez tartozó furatba a csapot visszaengedve állítható be. Mind a négy lábat azonos módon egyforma magasságra kell beállítani, ezt segíti az állító furatok melletti sorszám. A járókeret magasságát úgy állítsuk be, hogy a keretben állva a könyök kissé hajlított legyen, tenyerünkre támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat.

A járókeretet összecsucni vagy szétnyitni az oldalkereteket összekötő egymásba csúszo felső csövön lévő rugózott csap benyomásával lehet. Szétnyitáskor a rugózott csap automatikusan a helyére ugrik és rögzíti a járókeretet.

A járókeret használatánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni. A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas.

Ajánlatos a járás tanulást a következő szerint kezdeni: a lépés első fázisaként a beteg, gyengébb végtag felőli oldalán lévő keretet kissé megemelve előre helyezük azt, majd mellé lépünk miközben testsúlyunkat függőlegesen áthelyezzük a keret ezen oldalára. Ezután az ellenkező oldalt megemelve kissé a másik elé helyezük, majd a jó végtaggal mellé lépünk. Végül a sorrendet betartva lépegetünk. A helytelen sorrendű terhelés következtében az alsó végtag tehermentesítése nem lesz megfelelő.

A megfelelő tehermentesítést úgy érhetjük el, ha járókeretre függőlegesen rátámaszkodunk, és a levegőben tartva a fájós lábat lépünk. A láb földhöz való érintése nem számít teljes terhelésnek.

A lépegető járókeret fix, nem lépegető járókeretté alakítható. Ehhez az első lábakon lévő csapos rögzítő gyűrűt vegyük ki és helyezzük át a keresztmerezítő cső furatába. Ebben az állapotában a járókeret nem összecsucukható!

Fix járókeret esetén a járástanulást az alábbiak szerint ajánlatos kezdeni: a lépés első fázisaként előre tesszük a járókeretet fölépésnyire, majd a beteg, gyenge, fájós lábbal közlépünk úgy, hogy közben függőlegesen rátámaszkodva a keretre (tehermentesítve a fájós lábat) a jó lábbal kissé eléje lépünk.

FIGYELEM!

- **A járókeret oldalirányban nem terhelhető!**
- **A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5%-ot.**
- A járókeret szétnyitása után ellenőrizni kell a rugós csap helyreugrását.
- A botvéggumit szétnyíródás, elkopás esetén ki kell cserélni! Billenés és csúszásveszély állhat fenn.
- Csak az előírt botvéggumi (belső átmérő 28 mm) használható.
- A termék bármely alkatrészének (csapos gyűrű, markolat, rugós csap, váz stb.) meghibásodása esetén a járókeret nem használható! A meghibásodott alkatrész ki kell cserélni.
- A járókeret túl terhelése tilos, a járókeret elhajlásához, esetleges töréséhez vezethet.

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási – vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

4. Karbantartás, tárolás

4.1. Karbantartás

A járókeret különös karbantartást nem igényel. Az összecsucukást biztosító szerkezet, valamint az összeerősítő csavaroknak az időnkénti ellenőrzése, utánhúzása szükséges.

4.2. Tisztítás

A járókeret karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni. A bot minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

Ajánlatos időnként a markolatot a ráakódott szennyeződésektől megtisztítani.

4.3. Tárolás

A járókeretet jellegének megfelelő függőleges helyzetben sík padlózatra állítva ajánlatos tárolni, illetve összecsucukva bármely módon elhelyezhető. Gyakoribb szállítás esetén az elhelyezést megkönnyíti az összecsucukott állapot.

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált járókeretet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

A Használati útmutatót, Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevitelével vásárolta!



JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.


A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás (kerék, botvéggumi, kárpit) nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a forgalmazó székhelye szerinti megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

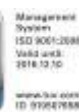

A



REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

csoport tagja.