



**GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET  
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ  
PRIMA-PROTETIKA KFT.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>



## VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

### D-4266 Fix szobai WC

**Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:**

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pávilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok	Tel: 20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pácsirta u.1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pácsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax: 76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u.83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755

**Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a \*-gal jelölt gyártóhelyeken (szerviz, javítás stb.).**

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

**Nagykereskedelmi lerakat:**

5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1. Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

*Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.*

**PRIMA-PROTETIKA Kft.**

**„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”**

A tájékoztatót készítette: Droppa Éva  
Jóváhagyta: Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő  
A vásárlói tájékoztató kiadva: 2016. április 10.

**A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

Gyártási szám: .....

Megrendelő neve: .....

címe: .....

Megrendelő TAJ száma: .....

Termék átadásának kelte: 20..... év ..... hó ..... nap

Felíró orvos neve: .....

**Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!**

EAN kód címke:

## **TISZTELT VÁSÁRLÓNK!**

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

### **1. Általános leírás**

Az Ön által megrendelt eszköz az emberi test anatómiájának figyelembe vételével készült. Orvosi rendelvényre, társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján adható ki.

A toalettszék mozgássérült és járásképtelen betegek részére készült ülőbútor, melynek párnázott ülőlapját kiemelve, a WC lapon kialakított lyuk alatt mobilizálható műanyagvödör található.

### **2 Használat**

A toalettszék a párnázott ülőlap eltávolításával szobai WC-ként használható, az ülőlap visszahelyezésével kényelmes ülőhelyül szolgálhat mozgássérült, vagy járásképtelen betegek részére.

Az ülőlap két oldalán kartámasz biztosítja a kényelmes ülést.

A műanyag edény eltávolítása után a szék könnyen a beépített WC fölé helyezhető. Ha a berendezést vödörrel használjuk, a vödröt behelyezés előtt célszerű kb. egyharmadig vízzel feltölteni. A fix szobai WC-szék csak függőlegesen terhelhető.

A csőláb végeit műanyag dugó zárja le, amiket elhasználódás esetén ki kell cserélni. A kiszolgáló szaküzletben megvásárolhatók.

A toalett szék csavarkötéseit rendszeresen ellenőrizni szükséges, (ülőke, háttámla) fellazulásuk esetén azokat haladéktalanul meg kell húzni.

### **3 Műszaki leírás**

A toalettszék vázszerkezete acélcsőből készül, csavarkötésekkel.

A fedlap kárpitozva kerül felszerelésre. A kartámasz szivaccsal ellátott. A WC lap alatti műanyag edény szolgál a vizelet és a széklet gyűjtésére, ami a vezetősínen hátracsúsztatva kiemelhető. A csőláb végeit műanyag dugó zárja le.

Saját tömeg:	8,7 kg	Magasság:	830 mm
Terhelhetősége:	110 kg	Hossza:	575 mm
		Szélesség:	595 mm

### **4 Tisztítás**

A toalettszék semleges hatású mosószeres vízzel átitatott puha, karcmentes anyaggal lemosható, majd szárazra törlendő.

**Figyelem!** Javasoljuk a műanyag vödör rendszeres fertőtlenítését!

### **5. Minőségtanúsítás**

EEKH regisztráció (006) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14

EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

**OEP által támogatott eszköz.**

### **6. Megfelelőségi nyilatkozat**

Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkoztatható alapvető követelmények mindegyikét.

*Kedves vásárlónk!*

*Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!*

.....