



ANITA-HUNGARIA KFT.
1123. Budapest,
Kék Golyó u.22.

Tel: (36-1) 487-1030
Fax: (36-1) 487-1033

e-mail: anita.h@anita.net
www.anita.com

Használati útmutató ó textilprotézis kezelése

A protézis töm anyaggal együtt, kézmeleg vízben, semleges mosószerrel mosható. A speciális töm anyag a vizet nem szívja be, mosáskor nem esik össze, megtartja eredeti formáját.

Az ideiglenes mellprotézisek viselése m tét után közvetlenül a m téti heg gyógyulásáig, illetve az esetleges sugárkezelés ideje alatt ajánlott.

A sebgyógyulás és a sugárkezelés lezajlása után az Anita textilprotézist mindig hordhatja tehermentesítésre a pihenés óráiban. Ha lazítani akar. A szilikon mellprotézis helyett, súlykiegyenlítésre nem alkalmas. Rendszeres használata igen könnyű súlya miatt nyak- és vállfájdalmakat eredményezhet.