



**ANITA-HUNGARIA KFT.**  
**1123. Budapest,**  
**Kék Golyó u.22.**

**Tel: (36-1) 487-1030**  
**Fax: (36-1) 487-1033**

**e-mail: [anita.h@anita.net](mailto:anita.h@anita.net)**  
**[www.anita.com](http://www.anita.com)**

### **Használati útmutató ó szilikonos mellprotézis kezelése**

A szilikon mellprotézis, pótolja az eml részleges vagy teljes eltávolítása következtében kialakuló szöveti hiányt, visszaadja az optikailag ideális küls megjelenést és helyreállítja a test anatómiai egyensúlyát.

Tökéletesen illeszkedik a mellkasfalra, lágyan követi a m téti heg vonalát, anélkül, hogy nyomást gyakorolna az érzékeny hegvonalra. Súlyban, konzisztenciában, mozgásban tökéletesen hasonlít az ép mellhez. Viseléskor átveszi a testh mérsékletet, így tapintáskor is ugyanolyan melegezést ad, mint a természetes mell. A mellprotéziseket igen finom tapintású a b rhöz hasonló küllem természetes alapanyagból készült fólia borítja. A fólia tökéletesen b rbarát, ezért a protézis közvetlenül a testen is viselhet , dermatológiai elváltozásokat nem okoz.

A protézist viseléskor a speciális protézistartó melltartó mellkosaraiba bevarrt -a protézisek számára kialakított - zsebbe kell behelyezni.

A szilikon mellprotézis ápolása:

Szilikon mellprotézisét naponta kézi mosással, enyhén szappanos vízzel mossa le, majd puha törölköz vel törölje szárazra.

A klóros, vagy sós víz nem károsítja mellprotézisét, azonban az agresszív tisztító- és oldószerek, a hegyes, vagy éles tárgyak, er s h hatás károsíthatják a protézist.

Ha a fólia megsérül javítása nem lehetséges.

Ezért használaton kívül ajánlott saját dobozában tárolni.

100 % szilikon