
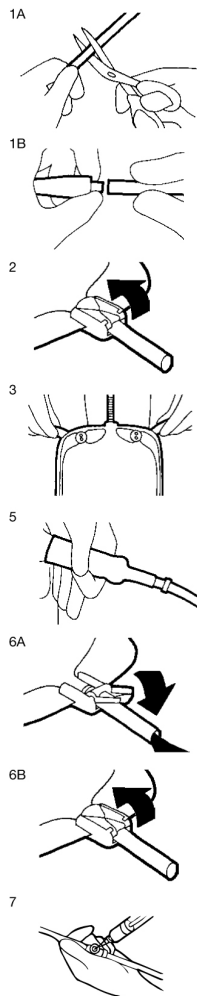
 Coloplast A/S
3050 Denmark Nem steril

 Coloplast A/S
0543 3050 Denmark Steril

IFU10208 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.
© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

A Conveen Contour lábzsák használata



1. Ha a csatlakozó nincs előzetesen a csőhöz csatlakoztatva:

A) A csövet az igényeknek megfelelően bármilyen hosszúságúra vághatja egy közönséges olló segítségével.

B) A csatlakozó csőhöz történő csatlakoztatásához szorítsa össze a csövet pár centiméterre annak végétől, és közben nyomja be a csatlakozót a csőbe, ameddig csak lehetséges.

2. A Conveen Contour lábzsák leeresztő csapja a zsák csomagolásakor mindig nyitott állapotban van. A zsák használata előtt zárja el a csapot! A leeresztő csap elzárásához nyomja felfelé a kapcsot, amíg az a helyére nem kattann.

3. Rögzítse a zsákot a lábához a Conveen rögzítő pánttal. Ahhoz, hogy a zsákot a lábához rögzítse, bújtsa át a gombokat a lyukakon a pánt mindkét végén, és igazítsa meg a pántokat úgy, hogy azok kényelmesen álljanak. Ne húzza szorosra a rögzítő pántokat, mivel ezzel károsíthatja a keringését. A lelógó, felesleges pántdarabokat levághatja.

40 °C-on mosva, a pántok legfeljebb 2%-kal mennek össze.

4. Amennyiben a csatlakozó védőkupakkal van ellátva, távolítsa el azt.

5. Stabilan csatlakoztassa a csatlakozót a vizeletkondomhoz vagy a katéterhez, és győződjön meg róla, hogy a cső nem tört meg, vagyis a vizeletáramlás nincs akadályoztatva.

6A. A zsák kiürítéséhez irányítsa a csövet a WC-be vagy egyéb megfelelő tartályba, és nyissa meg a leeresztő csapot. A zsák kiürítése könnyebb lehet, ha a művelet előtt kigombolja vagy eltávolítja az alsó rögzítő pántot.

6B. A zsák kiürítése után mindig zárja el a leeresztő csapot! A leeresztő csap elzárásához nyomja felfelé a kapcsot, amíg az a helyére nem kattann.

7. Kizárólag steril zsákok esetén. Szükség esetén vizeletminta vehető a mintavételi nyíláson keresztül.

Az úrtartalom további növeléséhez vagy éjszakai használathoz a Conveen Contour lábzsák Conveen Standard éjszakai vizeletgyűjtő zsákhoz csatlakoztatható. Zárja el az éjszakai vizeletgyűjtő zsák leeresztő csapját; nyomja rá határozottan az éjszakai vizeletgyűjtő zsák csatlakozóját a lábzsák kivezető csővére; nyissa meg a lábzsák leeresztő csapját.

Az éjszakai vizeletgyűjtő zsák eltávolításához zárja el a lábzsák leeresztő csapját, majd óvatosan csavarja le az éjszakai vizeletgyűjtő zsák csatlakozóját a lábzsák kivezető csővérről. Ne érintse meg a lábzsák kimeneti csővének nyitott végét, és mindig mosson kezet a csatlakoztatás/lecsatlakoztatás előtt!

Figyelem

Ennek az egyszer használatos eszköznek többszöri alkalmazása potenciális veszélyt jelent a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így a fizikai sérülés vagy a fertőzés további kockázatnövekedését jelentheti a beteg számára.

Figyelmeztetés

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért, amelyek a terméknek a Coloplast jelenlegi felhasználási javaslataitól eltérő alkalmazásából származnak.

Információ

A Conveen Contour lábzsák 600 vagy 800 ml-es méretben, 5, 30, 45 vagy 65 cm-es állítható csatlakozó csővel kapható.