


## URIN-4 JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI

- ❖ Anyaga egészségügyi célra használható lágyított PVC,
- ❖ kiöntőcsővel, kúpos csatlakozóval.
- ❖ visszafolyás gátlóval ---- a vizelet elvezetésére szolgáló eszközök egyik legfontosabb kritériuma, hogy megfeleljenek a zárt elvezetés és gyűjtés elvének, miszerint ne juthassanak a rendszerből a beteg irányába fertőző ágensek, illetve a fertőzött vizelet ne fertőzze vissza a beteget. Ezt egy speciális szeleplemezmechanizmussal, az úgynevezett visszafolyás gátlóval érjük el.

TÍPUS	LEERESZTÉS MÓDJA	FORMA	ÚRTARTALOM „ L „	KÜLSŐ MÉRET „ MM „
URIN - 4	ALSÓ LEERESZTÉS ( csap )		2,0	230*295

### Használati utasítás

Először a zsákot az egyenletes súlyeloszlás érdekében a perforált lyukak segítségével két ponton rögzítjük. A rögzítés lehetséges a betegágyra, ágy melletti állványra akasztással stb. A befolyó cső végén levő csatlakozódugó védőkupakjának eltávolítása után a kúpos csatlakozót a katéterbe szorosan csatlakoztatjuk, hogy biztosítsa a steril összeköttetést. A zsákon levő ml beosztás lehetővé teszi a kifolyt vizelet térfogatának megállapítását.

A zsákok ürítése az URIN-4-nél alsó leeresztéssel lehetséges