

ReCom-Med Kft.

1031 Budapest Nánási út 14/b.
Tel/Fax/Üzenet: (06-1)-242-7627
info@recommed.hu

**Használati
útmutató**

**ROHO® QUADTRO Select,
Contour Select**

Gyártó:



The ROHO Group

100 North Florida Avenue
Belleville, IL 62221-5429, U.S.A.
www.therohogroup.com
Tel: ++1-618-277-9150
Tel: ++1-618-277-6518

A jótállás 3 év, mely gyártási és anyaghibákra vonatkozik. Nem érvényes a jótállás a párnán található sorozatszám eltávolítása, szándékos rongálás, szakszer tlen javítás, valamint égés, és éles, vagy szűrő tárgygal okozott sérülés esetén!

Típus: _____

Sorozatszám: _____

Dátum

Aláírás


p.h.

A használati útmutatóról

A QUADTRO SELECT, és CONTOUR SELECT használati útmutatója az Ön új párnájának rendeltetésszerű használatáról, és karbantartásáról tartalmaz információkat. Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt termékünket használni kezdi. A QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT párna helyes beállítása rendkívül fontos a megfelelő testhelyzet megtartása, az Ön gyógyulásának segítése, és a térd védelme – a sebek kialakulásának megakadályozása szempontjából.

A QUADTRO SELECT ül párnáról


A QUADTRO SELECT párna új mérföldkövet jelent a kerekesszékekben ülők számára készült ipari termékek palettáján. Harminc év termékfejlesztési tapasztalatát ötvöztük felhasználóinktól kapott véleményekkel és javaslatokkal, melynek eredményeképpen a DRY FLOATATION technológia újszerű módon támogatja a vérkeringést az alapbeállítás, finombeállítás és

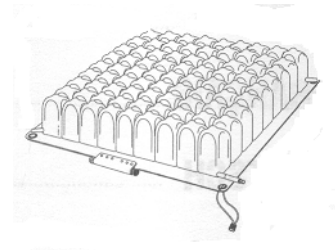

mozgáskövetés eszközeivel. A forradalmi ISOFLO Memory szabályzóelem ülés közben is lehetővé teszi a testformához történő igazodást, ami a használhatóság maximalizálása érdekében tetszőleges szerinti, ugyanakkor gyors és egyszer finombeállításra alkalmas. Az ülésstabilitást tovább növeli az a tény, hogy a levegő az ISOFLO Memory szabályzóelem elzárását követően az egyes párnanegyedekben marad. Ezáltal a levegő elre-hátra, ill. jobbról balra mozgása a minimumra csökken. A QUADTRO SELECT ülőpárna a maga természetes stabilitásával és egyszeriségével a térd védelme, a stabilitás, valamint a pozicionáló hatás és kényelem legjobb kombinációját biztosítja.

A CONTOUR SELECT ülőpárna

A CONTOUR SELECT ülőpárna a QUADTRO SELECT tulajdonságainak megtartása mellett, különböző magasságú cellái által tovább javítja az ülésstabilitást. A ISOFLO Memory szabályzóelem elnyeli megegyeznek a QUADTRO SELECT párna esetében leírtakkal.

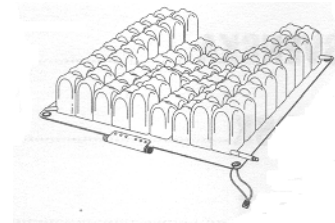

A DRY FLOATATION technológia

A DRY FLOATATION termékek a folyadékba merülő test felületének követését idézve teszik lehetővé, hogy a vele érintkező emberi szövetek a lehető legkisebb deformálódást szenvedjék el. A DRY FLOATATION termékek belsejét levegő tölti ki, így beállításuk az Ön egyéni testformájához, és tartásához rendkívül egyszerű. A ISOFLO Memory szabályzóelem nyitott (zöld gomb benyomva) állapotában a párna dinamikusan követi a testmozgásokat. Az ISOFLO Memory szabályzóelem elzárása (piros gomb benyomva) esetén a levegő áramlása a minimumra csökken, így a párna stabilizálja ülés helyzetét. Fontos ezáltal a párna helyes beállítása, melynél Ön a lehető legmélyebbre süllyed a párnában, anélkül, hogy elérné annak alját, „átúlná” azt. Olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, melynek során megtanulhatja, hogyan állítsa be helyesen QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT ülőpárnáját.

FIGYELEM !

Célszerű a párnát naponta ellenrizni, hogy az itt leírt veszélyhelyzetek elkerülhessenek.

LEENGEDÉS: Ha a párna leenged, az ül felület elbb-utóbb eléri annak alapját, („átüli a párnát”), így a hatásfok elvész. Ez a b rszöveti sebek gyógyulását akadályozza, ill. segíti azok kialakulását.

„ÁTÜLÉS”: Ha túl kevés a levegő párnában, el fordulhat, hogy használója ül felületének legalsó csontos pontja érinti a párna alját. Ez csökkenti, adott esetben megszünteti a párna terápiás hatását, és a b rszövet sebesedéséhez vezethet. A QUADTRO SELECT, ill. CONTOUR SELECT helyes beállítás esetén az ül felület legalsó csontos pontja, és a párna alja között legalább 1,25 cm (teherhordó) levegő rétegnek kell lenni.

TÚLFÚJÁS: A párnában lévő túlnyomás csökkenti a terápiás hatásfokot, és a b rszövet sebesedéséhez, vagy instabil üléspozícióhoz vezethet. Ilyen esetben kövesse a későbbiekben, a beállításról leírtakat.

MINDENKÉPEN KERÜLJE, HOGY:


- A párnába tű, vagy más hegyes/éles tárgy fúródjon
- A párnát sugárzó hő, vagy forró hamu érje
- A szelepnél fogva emelje fel a párnát
- Az ISOFLO Memory szabályzóelemnél fogva emelje meg a párnát
- Olajos alapú, vagy lanolin tartalmú folyadékok érinthetik a párnát, mert ezek a vegyületek az alapanyagként használt neopren felületét támadhatják meg
- Petróleum-alapú anyagok, vagy lágyítók elszínezhetik, vagy károsíthatják a párnát
- A párnát vízben, úszóeszközként használja
- A párnát autoklávban tisztítsák, mert a zárt szelepek miatt benne keletkezhet túlnyomás a párna szétszakadásához vezethet.

Ne emelje meg a párnát a ISOFLO Memory szabályzóelemnél fogva, mert a szabályzóelem mögött elhelyezkedő légvezetékek megtörése lassú leengedéshez vezethet. A párna megemelése a huzatra varrt szövet fogantyú szolgál.

Az USA Környezetvédelmi Hivatala, a Kanadai Egészségügyi Hatóság, és más kormányhivatalok figyelmeztető rendelkezéseket hoztak az ózongenerátorok alkalmazásával kapcsolatban. Utóbbiak károsak lehetnek az egészségre, és a gumifélék, szövetek, műanyagok, és más anyagféleségek lebomlását idézhetik elő, beleértve a ROHO párnához használt alapanyagot is. Ha a párna hosszabb ideig érintkezik ózonnal (pl. kvarclámpa – a ford.), a párna hatékonysága csökkenhet, és a jóállás érvényét veszti.

Kérjük, amennyiben a párna leeresztését, vagy átülési jelenséget tapasztal, melynek okát házilag nem tudja megszüntetni, azonnal lépjen kapcsolatba a ROHO Group-pal, annak magyarországi forgalmazójával, vagy az Önhöz legközelebb eső gyógyászati segédeszköz kereskedővel.

A QUADTRO SELECT, CONTOUR SELECT csomagjának tartalma

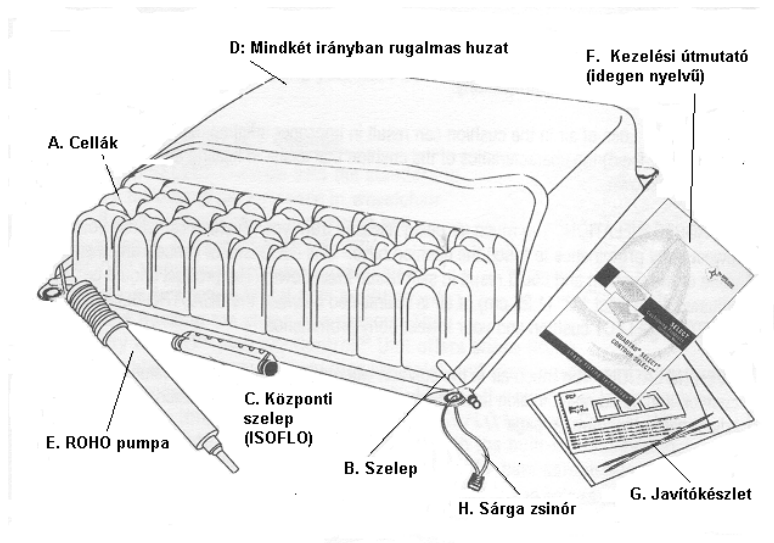


- A. **Cellák** – különálló, ROHO légcellák
- B. **Szelep** – Szerepe a leveg mennyiség szabályozása a párnában. A szelepnél fogva NE EMELJE MEG a párnát!
- C. **ISOFLO Memory szabályzóelem** - Az ISOFLO Memory szabályzóelem segítségével a leveg eloszlását szabályozhatja a párnán belül pozicionálási céllal, a stabilitás növelése érdekében. Elzárt állapotában (piros gomb benyomva) a négy kamra közötti légáramlás megszűnik. A szelepnél fogva NE EMELJE MEG a párnát!
- D. **Mindkét irányban rugalmas huzat** – A huzat a párna védelmét szolgálja, és csak minimálisan befolyásolja a terápiás hatást.
- E. **ROHO pumpa** – A párna felfújásához használatos.
- F. **Használati útmutató (idegen nyelv)** – Minden párnához idegen-, és magyar nyelv használati útmutató tartozik, mely a párna használatának, és karbantartásának tudnivalóit, valamint a jótállás feltételeit tartalmazza. Magyarországon a jótállás érvényesítéséhez Magyarországon kiállított jótállási jegy szükséges.
- G. **Javítókészlet** – Apróbb lyukadások javításához használatos, a későbbiekben leírtak szerint.
- H. **Fogantyú** – A sárga zsinórral a párna felemelhető.

Helyezze a QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT párnát a kerekesszék ülésére cellákkal felfelé, és az ISOFLO Memory szabályzóelemmel elre!


A huzatot a párnára a csúszásgátlós oldalával lefelé (párna sík felületére, a rugalmas felületével felfelé (a cellák oldalán) kell felhúzni. A huzat az ISOFLO Memory szabályzóelem számára külön nyílással rendelkezik.

A QUADTRO SELECT, CONTOUR SELECT párna beállítása


FIGYELEM! Ezt a szakaszt kihagyni NE HAGYJA KI!

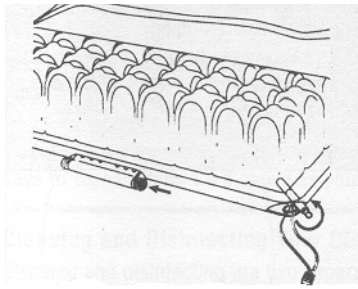


1. lépés: Nyissa ki a leereszt szelepet az óra járásával ellentétes irányban. Ellen rizze, hogy az ISOFLO Memory szabályzóelem zöld gombja legyen benyomva!

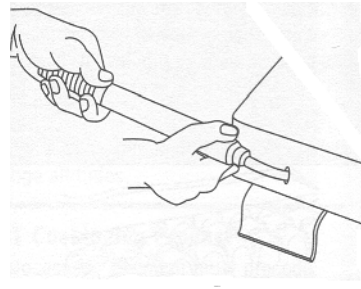


2. lépés: Csatlakoztassa a ROHO pumpa gumicsövét a szelephez, és fújja fel a párnát, míg az enyhén domborodni nem kezd.

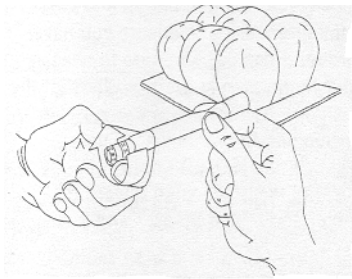


3. lépés: Vegye le a pumpa gumicsövét a szelepr l, és zárja el a szelepet az óramutató járásával egyez irányban.

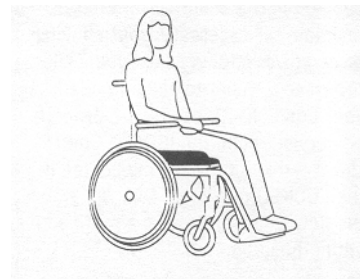



4. lépés: Üljön rá a párnára a kerekesszék kartámaszának és lábtartójának megszokott beállítása mellett.

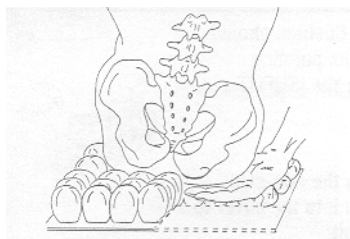

5. lépés: Csúsztassa felfelé mutató tenyerét a párna, és ül felületének legalsó csontos pontja közé (ül csont alá). Amennyiben Ön a m veletet nem tudná elvégezni, orvosa, gyógytornásza, ápolója, vagy családtagja segítségére lesz.

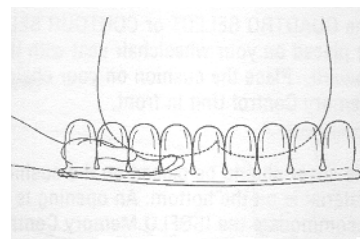

6. lépés: Míg egyik keze a legalsó csontos pont alatt marad, másik kezével nyissa meg a párna szelepét. A szelepen távozó leveg miatt Ön lassan belesüllyed a párnába. Amint ül csontja alatt lév kezének körmei a párna alját érintik, zárja el a szelepet. Az ül felület legalsó csontos pontja, és a párna alja között legalább 1,25 cm-es (teherhordó) légrétegnek kell maradni.

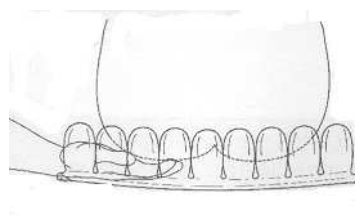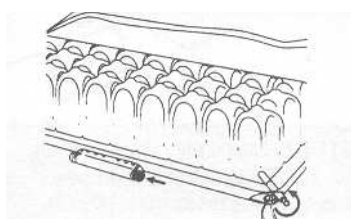

7. lépés: Helyezkedjen el a párnán olyan pozícióban, melyet kívánatosnak tart. Amennyiben szükséges, orvosa, vagy kísérője ebben is segít Önnek. Várjon egy kis időt, míg a párnában lévő levegő az új testhelyzetnek megfelelően kiegyenlítődik. A kívánt testhelyzet elérése után nyomja meg az ISOFLO Memory szabályzóelem piros gombját. A párna négy kamrája között ezzel a levegőáramlása megszűnik, és Ön a kívánt üléspozícióban marad.

8. lépés: Ellenőrizze a párnába történő bemenés mértékét azzal, hogy kezével ismét megkeresi a legalsó csontos pontot, és bizonyosodjon meg arról, hogy nem üli át a párnát. Amennyiben különböző tevékenységekhez az üléspozíció módosítására lenne szükség, nyissa ki az ISOFLO Memory szabályzóelemet, és ismétlje meg a 7. és 8. lépéseket.

FONTOS! További információk a beállításhoz

A SELECT párnák progresszív pozicionálást biztosítanak, tehát segítségükkel az üléspozíció bármikor átállítható. Ha új üléspozíciójában izomfáradást, vagy fájdalmat tapasztal, változtasson a beállításon. Javasoljuk, hogy egyszerre csak egy irányba állítsa át a párnát, és folyamatosan figyelje, mikor éri el a kívánatos pozíciót.

Célszerű a párnában lévő nyomást naponta ellenőrizni. Így elkerülhető, hogy egy esetleges lassú leengedés következtében Ön már „átüli” a párnát, de csak később veszi észre. A túl alacsony nyomás a terápiás hatás elvesztését vonja maga után. Szintén rontja a hatásfokot a túlzottan nagy belső levegőmennyiség. A test legalsó csontos pontja alatt legalább 1,25 cm teherhordó levegőrétegnek kell lenni.

A SELECT párnák esetében a belső levegőmennyiségét az ISOFLO Memory szabályzóelem segítségével állíthatjuk be, melyet felfújáskor nyitott állapotban (zöld gomb benyomva) kell tartani. Ez biztosítja azt is, hogy a párna a lehető legpontosabban illeszkedjen az ül felület alakjához. A szükséges levegőmennyiség beállítása után a pozicionáló-, (finom-) beállítás során kövesse korábban leírt 7. és 8. lépéseket.

A SELECT párnák belső nyomását a környezeti légnyomás is befolyásolhatja. Amennyiben a párna környezetében a légnyomás tartósan megváltozik, a beállítást (1-8 lépések) meg kell ismétlni.

Tisztítás és fertőtlenítés

A tisztítás és fertőtlenítés külön műveletek, ahol a tisztításnak a fertőtlenítést meg kell előznie.

A párna tisztításához préselje ki a levegőt a párnából, zárja el a szelepeket, és helyezze a párnát a kádba (ill. bármely, a párna méretét meghaladó lavórba). Mossa le a cellákat, és azok közeit lágy anyag kefével, szivaccsal, vagy ronggyal. Mosószerként folyékony mosogató-, vagy mosószert, vagy általános tisztítószer ajánlunk. Intézményben történő tisztítás esetén fertőtlenítő hatású általános tisztítószer is megfelel.

A huzat tisztításához vegye azt le a párnáról, és tegye mosógépbe. Hideg vízzel, folyékony általános mosószerrel tisztítható. Levegőn, kitergetve szárítsa. Fehérítőszer alkalmazása, vagy meleg szárítás tilos.

A SELECT párnák fertőtlenítéséhez csak engedélyezett, csíraölő hatású szert használjunk. A ROHO tuberkulózis-csírák ellen hatásos szert ajánlunk. Minden esetben kövesse a szer gyártójának, a higításra vonatkozó elírásait. Otthoni használat számára történő fertőtlenítés esetén használjon 1 liter vízhez 125 ml háztartási fehérítőt. A megtisztított párnán kb. 10 percig hagyja rajta a fertőtlenítő oldatot, majd alaposan öblítse azt le, és szárítsa meg a párnát.

A huzat fertőtlenítéséhez fenol alapú szert javasolunk (pl. LYSOL). Magas hőmérséklet, vagy fehérítőszer alkalmazása, valamint autokláv használata tilos.

Sterilizálás esetén ne használjunk 93°C-nál magasabb hőmérsékletet. A magas hőmérséklet gyorsítja az anyag természetes öregedését, és a párna károsodását idézheti elő. Szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten történő tisztítás esetén a QUADTRO SELECT, ill. CONTOUR SELECT párna szelepeit ki kell nyitni!

LANOLINOS, VAGY OLAJOS ALAPÚ SZEREK ALKALMAZÁSA TILOS, MERT EZEK MEGBONTHATJÁK A PÁRNA FELÜLETÉT!

Lyukadások javítása

A párnát óvni kell éles, hegyes tárgyaktól, valamint forró hamuval, nyílt lánggal történő érintkezéstől. Ha a QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT párnán mégis kis lyuk keletkezik, azt a dobozban lévő javítókészlettel otthon is ki tudja javítani. Kövesse a javítókészletben lévő javítási útmutatót. Javítást követően rendszeresen ellenőrizze az öntapadó fólia állapotát, hogy az idővel megdermedjen, és teljesen lezárja a nyílást. Naponta ellenőrizze a párnában lévő levegő mennyiségét, hogy az „átülés”-t elkerülje. Amennyiben a javítás nem érte el a kívánt célt, vagy a párna sérülése komolyabb területet érint, kérjük, további segítségért lépjen kapcsolatba gyógyászati segédeszköz kereskedőjével, vagy a ROHO helyi forgalmazójával.

A ROHO Group fenntartja magának a jogot, hogy a javíthatóságról szóló végső döntést meghozza. Jótállási időn túli javítás esetén a szállítás, javítás, és visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli. Javítási árajánlat kérése írásban, a párna beküldésével egyidejűleg történhet. Árajánlat iránti kérés hiánya esetén a javítást végző szerv (a ROHO Group, vagy annak helyi megbízottja) abból indul ki, hogy a javításra megbízást kapott, és azt ennek megfelelően elvégzi.

Magyarországon a javítás árához – a mindenkorai rendelkezések által meghatározott mértékben – a társadalombiztosítás támogatást nyújthat. A támogatás aktuális mértékéről a magyarországi forgalmazó nyújt felvilágosítást.

A párna visszaküldése

A párna visszaküldése elvárt egyeztetés alapján történhet. Méret, vagy típuscseréje Magyarországon kizárólag gyári új párna esetében lehetséges, melyen csomagolás, és annak minden részlete érintetlen. A jótállási jegy hiánya esetén semmilyen cserére nem tudunk lehetőséget adni.

Javítások

Sz	Dátum	Hiba jellege	Anyagköltség	Munkadíj	Javítást végezte
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					