


# GENU SYNCRO 680

A térd természetes mozgását követő, szabályozható mozgásterjedelmű és fixálható sínezettel ellátott térdrögzítő, mely ajánlott nagyfokú térdízületi instabilitás, kereszt- vagy oldalszalag sérülések esetén valamint posttraumás állapot után a rehabilitációs kezelés kiegészítőjeként. A sínezet az új PAT rendszernek köszönhetően könnyen eltávolítható, ill. adaptálható.

- \* syncrolast pamutbéléses tok
- \* a tok a térd alatt és felett is nyitott
- \* hossz: 39 cm
- \* 2 x 4 db önbeálló tépőzár (Press And Turn: PAT)
- \* 4 tengelyes térdízületi sín
- \* 45°, 60° és 90° flexiós - és
- \* 10°, 20° és 30° extenziós beállítási lehetőség
- \* 5° hyperextenzió gátló lehetőséggel
- \* 5° fixálási lehetőség

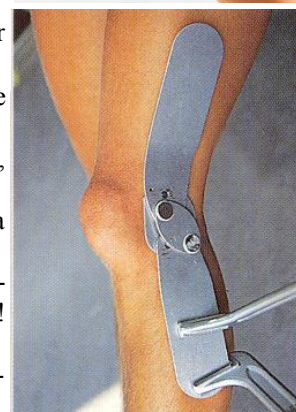


A sínek tokba történő behelyezésekor ügyeljen:

- a síneken található fél szélességben felhelyezett horgos tépőzár kerül a rögzítő felső külső oldalához
  - először a keskenyebb, majd a szélesebb tépőzárat kell a sínre ráhajtani
  - a tépőzár végén található műanyag fület először rá kell nyomni, majd, 90°-ban elforgatni, eltávolítása fordított sorrendben történik
- A sínek szakember által történő pontos lábhoz igazítása fokozza a rögzítő stabilitását, hatásfokát.

**Tisztítás:** semleges mosószerrel langyos vízben nyomkodással tisztítható. Kicsavarás nélkül fektetve szárítsa! Mosógépben való tisztítás nem javasolt.

Mosás előtt az alumínium síneket el kell távolítani a huzatból, de gyegyezze meg a sínek eredeti helyzetét!

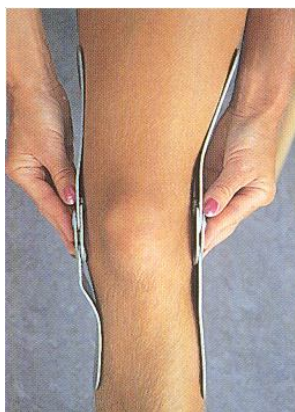

## Mellékhatások

Szakszerű használat és viselés esetén a szervezet egészét érintő mellékhatások ez ideig nem ismertek. Azok a gyógyászati segédeszközök – sínek, ortézisek -, amelyeket kívülről a testfelszínre illesztünk, túlzottan szorosan felhelyezve bizonyos pontokon nyomási tüneteket okozhatnak vagy ritkán az ott futó ereket, idegeket összenyomhatják.

## Ellenjavallatok

Beavatkozást igénylő túlérzékenység ez ideig nem ismeretes. Az alábbi betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések a rögzítendő területen, különösen gyulladáshoz vezető tünetek esetén. Ide tartoznak azok a felszakadt heggek is, melyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el.
4. Érzés- és keringéscsökkentések, pld. cukorbetegség (diabetes mellitus)

## Fontos tudnivalók

- A térdrögzítőt csak a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően és az ugyanott leírt alkalmazási területeken szabad használni.
- A terméket csak egy beteg kezelésének időtartamára tervezték.
- Szakszerűtlen használat esetén a termék szavatossága elvész.
- A termék tilos bármiféle szakszerűtlen átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.
- Amennyiben szokatlan változásokat vesz észre magán (pld. a panaszok fokozódása), haladéktalanul keresse fel orvosát.
- Ha egy időben más terméket is (pld. kompressziós harisnyát) használna, azt előzetesen beszélje meg kezelőorvosával.
- Az ortézis főként mozgás során fejti ki hatását. Hosszabb pihenés idejére (pld. alvás, hosszabb ülés) le kell venni.
- A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok.
- Garanciát az érvényes törvényi rendelkezések alapján nyújtunk. Az elhasznált terméket a háztartási szemétként dobhatja.

EAN kód:

Körfogat cm-ben	MÉRETEK					
	1	2	3	4	5	6
Térdközép fölött 15 cm-rel	35-40	40-45	44-50	49-55	54-61	60-68
Körfogat a térdközépnél	30-33	34-37	38-41	42-45	46-50	51-55
Térdközép alatt 15 cm-rel	28-32	32-36	35-40	39-44	43-49	48-54

A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni szíveskedjen! **Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el.**

OTH Reg. szám:

36252/2002

Gyártó/Forgalmazó:

LBT Kft.

1134 Budapest, Dévai u. 11-13.

Tel: 239-2282, Fax: 340-1309



Méret:

Oldal:

