



ANITA-HUNGARIA KFT.
1123.Budapest,
Kék Golyó u.22.

Tel: (36-1) 487-1030
Fax: (36-1) 487-1033

e-mail: anita.h@anita.net
www.anita.com

Használati útmutató és leírás ó Anita protézistartó melltartók kezelése

A protézistartó melltartók speciális ó a hagyományos melltartóktól eltér ó kialakítása biztosítja mindazokat a követelményeket, amelyek mellm tét után orvosilag és esztétikailag elengedhetetlenek.

A mellkosarakba bevarrt vagy speciális bevarrható zsebek biztosítják a protézis tökéletes tartását, így az mozgás alkalmával sem csúszik el.

A melltartókba bedolgozott mellemel , a széles teherelosztó betétellátott vállpántok és a szélesebb mell alatti pánt biztosítják a kímél tartást,

A kiszélesed , magasabbra szabott kar alatti rész, különösen a hónalji nyirokcsomók eltávolítása esetén biztosít megfelelő tartást, így nem alakulnak ki nyomáspontok.

A hátrészen háromfokozatú méretállítási lehetőség biztosítja a megfelelő b séget.

A vállpántok a hátoldalon állíthatóak, így nem alakulnak ki nyomáspontok.

Az alápárnázott kiszélesed tehermentesít vállpántok, egyenletesen osztják el a mellek súlyát a vállakon, megelőzve a nyaki és gerincpanaszokat.

Nyiroködémás kar esetén kizárólag széles vállpántú melltartó viselése ajánlott.

A protézistartó melltartók dermatológiailag ellen rözött anyagösszetétele kellemes viselet, b rirritációt nem okoz.

Er s verejtékezési hajlammál a mikroszál alapanyagú melltartók ajánlottak.

A protézistartó melltartó a hagyományos melltartó felvételével azonos módon történik, azzal a különbséggel, hogy vagy a melltartó felvétele / bekapcsolása el tt, kezében tartva, vagy a melltartó bekapcsolása után, a vállpánt felvétele el tt behelyezi a mellprotézist a speciális protézistartó zsebbe.

Az Anita melltartó tisztítása: maximum 40° C-os vízben óvatos nyomkodással kézi mosással, vagy mosógépben mosózsák használatával mosható. Kézi mosás alkalmával fontos az alapos b vízben történ őblítés. Melltartók mosásakor ne használjon fehérít t.