

Szerviz egységek:**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224
 3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196; Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593

+REHAB®
Alapítva 1915

Használati útmutató

B-4021
Szobai WC



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

**B-4021/F Fix szobai WC****B-4021/G Gördíthető szobai WC****1. Felhasználási terület:**

A szobai WC a házi betegápolás megkönnyítésére, az önellátására tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni. A kárpitozott ülőbetéttel szobai székként is használható.

A B-4021/G szobai WC nem alkalmas a beteg mozgatására, kerekesszékként való használatra!

2. Jellemző méretek, adatok:

	B-4021/F	B-4021/G
Tömeg:	9,4 kg	11,8 kg
Felhasználó max. megengedett tömege:	100 kg	100 kg
Beülő magasság (ülőkebetét nélkül):	455 mm	470 mm
Beülő magasság (ülőkebetéttel):	490 mm	505 mm
Beülő szélesség:	440 mm	440 mm
Beülő mélység:	430 mm	430 mm
Magasság:	850 mm	860 mm
Hosszúság (kihajtott lábtartóval):	N/A	660 mm
Szélesség:	545 mm	545 mm
WC csésze befoglaló méretei, ami fölé a termék elhelyezhető (szél x mag):	440 x 385 mm	440 x 390 mm

Tartozékok:

1 db műanyag edény fedővel
 1 db ülőbetét
 1 db használati útmutató

3. Használat

A **B-4021/F** szobai WC lábtartója a szállítás miatt be van hajtva. Kérjük, üzembe helyezése előtt a lábtartót hajtsa ki és rögzítse a bilincs csavarjainak meghúzásával.

A szoba WC-t az ülőkéjét takaró ülőkebetét, valamint a vödörtető eltávolítása után lehet használni. Ezt követően a szoba WC elé háttal állva, a karfákon megtámaszkodva ráereszkedünk az ülőkére. Lényeges, hogy mind a két kézzel támaszkodjunk, ellenkező esetben billenés veszélye áll fenn. Erős fizikai gyengeség esetén a beülés, illetve a kiszállás mindenképpen segítő közreműködésével történjen!

A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható onnan ki.

Vödör nélkül a termék, beépített WC csésze fölé helyezhető.

Beülés előtt a B-4021/G típust a hátsó keréken lévő rögzítő fékekkel minden esetben rögzíteni kell! Használat és a kiszállás után oldja a féket a WC mozgatásához.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Eladószerv tölti ki!	
A vásárlás napja: 20.....hó.....nap (hónap betűvel) aláírás (P.H.)	
Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3
Típus: B-4021/.....	Bejelentés időpontja:
Gyártási szám:	Megjavítás időpontja:
Kelt:20.....hó.....nap	Bejelentett hiba:
Eladó:	Elhárított hiba:
aláírás (P.H.)	A jótállás új határideje:
	Munkalapszám:
	Kelt:20.....hó.....nap
	Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2
Típus: B-4021/.....	Bejelentés időpontja:
Gyártási szám:	Megjavítás időpontja:
Kelt:20.....hó.....nap	Bejelentett hiba:
Eladó:	Elhárított hiba:
aláírás (P.H.)	A jótállás új határideje:
	Munkalapszám:
	Kelt:20.....hó.....nap
	Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1
Típus: B-4021/.....	Bejelentés időpontja:
Gyártási szám:	Megjavítás időpontja:
Kelt:20.....hó.....nap	Bejelentett hiba:
Eladó:	Elhárított hiba:
aláírás (P.H.)	A jótállás új határideje:
	Munkalapszám:
	Kelt:20.....hó.....nap
	Aláírás (P.H.)

4. **Karbantartás, tárolás**

4.1. **Tisztítás**

A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.

A műanyag vödört minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt fertőtlenítőszerrel (Hypo, Domestos) kitisztítani. A kárpitozott felső rész, illetve az ülőke fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!

4.2. **Tárolás**

A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!

4.3. **Karbantartás**

A szobai WC csavarkötéseit a használat gyakoriságától függően havonta- negyedévente ellenőrizni szükséges. Lazulás esetén a csavarokat után kell húzni.

4.4. **Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

FIGYELEM!

- **A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében **KÖTELEZŐ!****
- **A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!**
- A kartámasz megsérülése, meglazulása esetén után húzás vagy csere szükséges!
- A kerek külső felületének roncsolódása esetén a kereket ki kell cserélni!
- A fékhiba esetén a kereket ki kell cserélni!
- Használat előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vödör a megvezető sínek között helyezkedik-e el, illetve arról, hogy a fedél nélküli vödör az ütközőcsapokig be legyen tolv!
- A szoba WC- t csak a megengedett súlyhatárig lehet terhelni!
- A talptámaszra ráállni TILOS! A talptámasz törése nem része a garanciális jogosultságnak.
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása esetén a szoba WC-t használni TILOS!
- A B-4021/F típus botvéggumijának elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, csúszás- ill. billenésveszély áll fenn! A botvéggumi belső mérete: Ø 22 mm

Alkatrészek beszerzése a szervizegységeknél lehetséges.

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

REHAB Zrt.

A **MEYRA** GROUP tagja.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás (kerék, botvéggumi, kárpit) nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a forgalmazó székhelye szerinti megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy a Szobai WC-t javításra, csak tisztán, fertőtlenített vödörrel és ülőlappal tudjuk átvenni. Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk visszautasítani.