

Szerviz egységek:**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224
 3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196; Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593

**Használati útmutató****B-4323**

Állítható magasságú szobai WC



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitértetésre került!

1. Felhasználási terület:

A B-4323 típusú állítható magasságú szobai WC otthoni használatra, a házi betegápolás megkönnyítésére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni. Azoknak a betegek, akiknek a vízöblítéses WC ülőke magassága túl alacsony, és a felállás, illetve a leülés nehézséget okoz, a műanyag edény eltávolítása után a WC kagyló fölé állítva WC magasítóként is használható.

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

2. Jellemző méretek, adatok

Tömeg: 10 kg
 Felhasználó max. megengedett tömege: .. 100 kg
 Beülő magasság:..... 480–580 mm
 Magasság állíthatóság..... 25,4 mm/fokozat
 Beülő szélesség: 400 mm
 Kartámasz magassága ülőkétől: 220 mm
 Magasság:..... 670 - 770 mm
 Hosszúság: 520 mm
 Szélesség:..... 520 mm

Tartozékok:

1 db. műanyag edény
 1 db. Használati útmutató

3. Használat

A szobai WC ülőke magasságának alapértéke 480 mm, amely 25,4 mm-enként állítható 580 mm beülő magasságig.

A magasság beállítása a lábakon található rugós csapok segítségével történik. A csapot benyomva a két csövet egymáshoz képest elcsúsztatjuk, majd a csapot a kívánt furatba visszaengedjük. Az összes lábón ugyanazt a beállítást használjuk!

Az ülőkefedél az ülőke felhajtott állapotában a hátsó ütközőhöz támaszkodik, vagy fal mellé állítva a falhoz ütköztethető. A műanyag edény az ülőkét felemelve, felülről helyezhető be, ill. vehető ki.

JÓTÁLLÁSI JEGY	
Eladószerv tölti ki!	
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)	
Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3 Típus: B-4323 Gyártási szám: Kelt:20.....hónap Eladóaláírás (P.H.).....	Bejelentés időpontja: 3 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20.....hónapaláírás (P.H.).....
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2 Típus: B-4323 Gyártási szám: Kelt:20.....hónap Eladóaláírás (P.H.).....	Bejelentés időpontja: 2 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20.....hónapaláírás (P.H.).....
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1 Típus: B-4323 Gyártási szám: Kelt:20.....hónap Eladóaláírás (P.H.).....	Bejelentés időpontja: 1 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20.....hónapaláírás (P.H.).....

Az edény behelyezésekor figyeljünk, hogy pontosan az ülőkenyílás alá kerüljön. Szállításakor vagy hosszabb ideig tartó tároláshoz a szobai WC szétszedhető, a műanyag edény kiemelése után az ülőkevázat tartó 8 db M8-as csavar oldásával.

4. **Karbantartás, tárolás**

4.1. **Tisztítás**

A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.

A műanyag vödört minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt fertőtlenítőszerrel (Hypo, Domestos) kitisztítani. Az ülőke és ülőke fedél fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!

4.2. **Tárolás**

A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!

4.3. **Karbantartás**

A szobai WC csavarkötéseit a használat gyakoriságától függően havonta- negyedévente ellenőrizni szükséges. Lazulás esetén a csavarokat után kell húzni.

4.4. **Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

FIGYELEM!

- ***A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében KÖTELEZŐ!***
- ***A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!***
- A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, csúszás- ill. billenésveszély áll fenn! A botvéggumi belső mérete: Ø 28 mm.
- A magassági méret szabályozására szolgáló bármely rugós csap meghibásodása esetén a szobai WC-t nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- Sérült, repedt vödör nem használható, csere szükséges!
- A szobai WC-t csak a megengedett maximális felhasználói tömegig szabad terhelni!
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása, kötőelemek lazulása esetén a szobai WC-t használni TILOS!

Alkatrészek beszerzése a szervizegységeknél lehetséges.

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) vagy a kijelölt szerviz egységeknél érvényesíthető.

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy a Szobai WC-t javításra, csak tisztán, fertőtlenített vödörrel és ülőlappal tudjuk átvenni. Ellenkező esetben az átvételt kénytelenek vagyunk megtagadni!

REHAB Zrt.

A **MELDORT** csoport tagja.



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330