

Figyelem

A víztartály, a kónuszos végű cső, a nyomólap és az öv újrahasználatos eszközök. A leeresztő zsák egyszer használatos eszköz.

A jelen egyszer használatos zsák újrafelhasználása potenciális veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve. A termék tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja annak tulajdonságait, így a fizikai sérülés vagy a fertőzés további kockázatát jelentheti a beteg számára.

Az ehhez az irrigáló szetthez használt víztartály ftalátokat tartalmaz, és orvosi jóváhagyás nélkül nem alkalmazható gyermekeknél, illetve terhes vagy szoptató nőknél.

Az irrigálórendszer nem használható, ha hasmenésben szenved.

Figyelmeztetés

Az irrigálási eljárás kizárólag az orvos vagy nővér által adott utasításoknak megfelelően végezhető.

A Coloplast azt javasolja, hogy ne használja az irrigáló szettet 3 hónapnál tovább. Ha az irrigáló szetre 3 hónapnál hosszabb ideig van szükség, ki kell cserélni új szetre.

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű károkért, amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

Információ

Az irrigáló szett sztómával élők számára készült irrigálás céljára.

A Coloplast irrigálórendszerét úgy terveztük, hogy az egyszerű és biztonságos irrigáláshoz szükséges alapvető eszközök az ön rendelkezésére álljanak.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

Az irrigáló szett használata


1




2




3

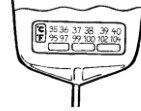


4

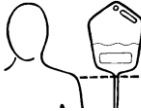

5

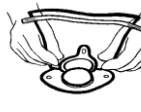

6

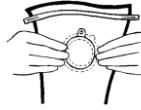


7



8



9

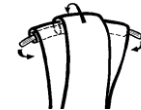

10



11



Előkészítés

1. Csatlakoztassa a csövet a kónusztól a csatlakozóig (ha nincs csatlakoztatva).

2. Győződjön meg arról, hogy az áramlásszabályozó teljesen zárva van.

3. Töltsön az irrigáló tartályba körülbelül 0,5–1,5 l (1–3 pint) langyos vizet. Az irrigáló tartály amerikai pintekben van skálázva. A víz megfelelő hőmérsékletét világoszöld jelzés mutatja az egyik sarokban. A hőmérsékletnek 36 °C és 38 °C között kell lennie irrigálásakor. Ha a hőmérőn nem látható jelzés, a víz vagy túl hideg, vagy túl meleg.

Nyissa ki az áramlásszabályozót, és hagyja, hogy a víz keresztülfollyjon a csövön, ezzel eltávolítva a fölösleges levegőt. Ha a levegő eltávozott, zárja el az áramlásszabályozót.

4. Függessze fel a víztartályt úgy, hogy az alja vállmagasságban legyen. Ha úgy látja, hogy a víz túl lassan áramlik a sztómába, segíthet, ha kissé feljebb emeli a víztartályt.

Alkalmazás

5. Egrészes irrigáló szett használata

Az irrigáló zsák rögzítéséhez nyomólapot kell használnia. Tegye a nyomólapot az asztalra a karimájával fölfelé. Csatlakoztassa a zsákot a nyomólaphoz úgy, hogy a nyomólap karimájának aljára akasztja, majd a karima mentén felfelé mozdítja az ujjait. Kattanást hall, ha a zsák megfelelően csatlakozott.

Csatolja az övet a derekára, és erősítse a nyomólaphoz. Győződjön meg arról, hogy kényelmesen helyezkedik el a sztóma körül.

6. Kétrészes irrigáló szett használata

A Coloplast eszközön lévő elfordítható, gyűrűs perem lehetővé teszi, hogy ne gyakoroljon nyomást a hasra. Csatlakoztassa a zsákot az alaplap pereméhez úgy, hogy a perem aljára illeszti. Ezután az ujjával felfelé nyomva rögzítse a zsákot az egész perem körül. Amikor az eszköz biztosan rögzül, kis kattanást hall.

Övek és övtartó gyűrűk külön is kaphatóak, ha további biztonságot szeretne az irrigálás során. Csak helyezze az övtartó gyűrűt a zsákon lévő tasak gyűrűje alá, mielőtt csatlakoztatná az irrigáló zsákot az alaplap pereméhez. Csatolja a derekára az övet, és az övtartó gyűrűvel szorítsa meg.

7. Helyezze az irrigáló zsák végét a WC-be (vágja le ollóval, ha szükséges), és a zsák tetején keresztül helyezze a kónuszos csővéget a sztómába (szükség esetén használat előtt sikósítsa a kónuszt).

8. Tartsa a kónuszt a sztómában, nyissa ki az áramlásszabályozót, és lassan engedje a vizet a bélbe. A víz áramlását az áramlásszabályozó sebességének állításával szabályozhatja.

Amikor az előírt mennyiségű víz a bélbe jutott, zárja el a vízáramlást. Vegye ki a kónuszt a sztómából. (A kónusz eltávolítása után kevés víz és széklet ürülhet).

9. Tisztítsa meg a kónusz alját a WC fölé. Vigye az irrigáló zsák alját a zárócsipeszig, és tekerje fel a csipesz köré a zsák mindkét végét 6-7-szer. A zsák rögzítéséhez fordítsa rá a csipeszek végeit.

10. Ha érzi, hogy a belek ürülni kezdenek, lazítsa meg a zárócsipeszt, és helyezze a zsák alját a WC-be.

Eltávolítás

11. Amikor az ürítés befejeződött, vegye le a zsákot a nyomólapról vagy alaplapról a zsák kis fülének finom meghúzásával. Öblítse ki a zsák végét, amíg leöblíti a WC-t. Ne öblítse le a zsákot a WC-ben.

Tisztítás

Miután levette az övet és a nyomólapot, tisztítsa és szárítsa meg a sztóma körüli bőrt.

A víztartály tisztításához ne használjon 60 °C-nál melegebb vizet, mert az tönkreteszi a hőmérőt. Használat után tisztítsa meg a kónuszt és szárítsa meg a víztartályt. A kónusz megtisztításához válassza le a kónusz csövét a csatlakozóról. Győződjön meg arról, hogy az alaplap tiszta és száraz.

Használjon Con Seal sztómadugót, egy- vagy kétrészes sztómaterápiás segédeszközt.

Jelek



Ftalátot tartalmaz: di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)