


Irrigáló szett



IFU23312635 v4 A Coloplast logó a Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye.
© [2012-03] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, Holteham 1, 3050 Humlebaek, Dánia.

Az irrigáló szett használata

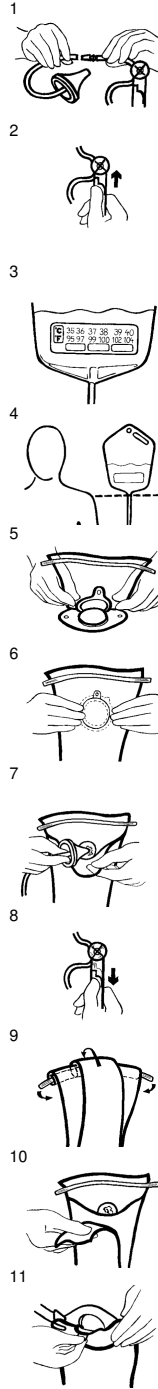

Előkészítés

1. Csatlakoztassa a csövet a kónusztól a csatlakozóig (ha még nincs csatlakoztatva).
2. Győződjön meg arról, hogy az áramlásszabályozó teljesen zárva van.
3. Töltsön a víztartályba körülbelül 0,5–1,5 l (1–3 pint) vizet. A víz megfelelő hőmérsékletét világoszöld jelzés mutatja az egyik sarokban. A vízhőmérsékletnek 36 °C és 38 °C között kell lennie irrigálásor. Ha a hőmérőn nem látható jelzés, a víz vagy túl hideg, vagy túl meleg. Nyissa ki az áramlásszabályozót, és hagyja, hogy a víz keresztülfolyjon a csövön, ezzel eltávolítva a főleges levegőt. Ha a levegő eltávozott, zárja el az áramlásszabályozót.
4. Függeszse fel a víztartályt úgy, hogy az alja vállmagasságban legyen. Ha úgy látja, hogy a víz túl lassan áramlik a sztómába, segíthet, ha kissé feljebb emeli a víztartályt.

Alkalmazás

5. Egyrészes eszköz használata

A leeresztő zacskó rögzítéséhez nyomólapot kell használnia. Tegye a nyomólapot az asztalra a karimájával felfelé. Csatlakoztassa a leeresztő zacskót a nyomólaphoz úgy, hogy azt a nyomólap karimájának aljára akasztja, majd a karima mentén felfelé mozdítja az ujjait. Kattanást hall, ha a leeresztő zacskó megfelelően csatlakozott. Csatolja az övet a derekára, és erősítse a nyomólaphoz. Győződjön meg arról, hogy az öv kényelmesen helyezkedik el a sztóma körül.

6. Kétrészes eszköz használata

A Coloplast alaplapon lévő „lebegő” perem lehetővé teszi, hogy ne gyakoroljon nyomást a hasra. Csatlakoztassa a leeresztő zacskót a peremhez úgy, hogy azt a perem aljára akasztja. Ezután az ujjával felfelé nyomva rögzítse a leeresztő zacskót az egész perem körül. Amikor az eszköz biztosan rögzül, kis kattanást hall.

Övek és nyomólapok külön is kaphatók. Csak helyezze a nyomólapot a leeresztő zacskó gyűrűje alá, mielőtt csatlakoztatná a leeresztő zacskót az alaplapon pereméhez. Csatolja az övet a derekára, és erősítse az alaplaphoz.

7. Helyezze a leeresztő zacskó alsó végét a WC-be (vágjon le a hosszából, ha szükséges), és a leeresztő zacskó tetején keresztül helyezze a kónuszt a sztómába (szükség esetén használat előtt síkosítsa a kónuszt).

8. Tartsa a kónuszt a sztómában, nyissa ki az áramlásszabályozót, és lassan engedje a vizet a bélbe. A víz áramlását az áramlásszabályozó sebességének állításával szabályozhatja.

Amikor az előírt mennyiségű víz a bélbe jutott, zárja el a vízáramlást. Vegye ki a kónuszt a sztómából. (A kónusz eltávolítása után kevés víz és széklet ürülhet).

9. Tisztítsa meg a kónusz alját a WC fölött. Vigye a leeresztő zacskó alját a zárócsipeszig, és tekerje fel a csipesz köré a leeresztő zacskó mindkét végét 6-7-szer. A leeresztő zacskó rögzítéséhez fordítsa rá a csipeszek végeit.

10. Ha érzi, hogy a belek ürülni kezdenek, lazítsa meg a zárócsipeszt, és helyezze a leeresztő zacskó alját a WC-be.

Eltávolítás

11. Amikor az ürítés befejeződött, vegye le a leeresztő zacskót a nyomólapról vagy a peremről a leeresztő zacskó kis fülének finom meghúzásával. Öblítse ki a leeresztő zacskó végét, amíg leöblíti a WC-t. Ne öblítse le a leeresztő zacskót a WC-ben.

Tisztítás

Miután levette az övet és a nyomólapot, tisztítsa és szárítsa meg a sztóma körüli bőrt.

A víztartály tisztításához ne használjon 60 °C-nál melegebb vizet, mert az tönkretesz a hőmérőt. Használat után teljesen szárítsa meg a víztartály belsejét. A víztartály belsejéből a nedvességet egy kendővel itassa fel. A kónuszt és a csövet langyos szappanos vízzel tisztítsa meg, majd szárítsa meg. Győződjön meg arról, hogy a nyomólap tiszta és száraz.

Használjon Conseal sztómadugót, egyrészes vagy kétrészes sztómaterápiás eszközt.

Figyelmeztetés

A víztartály, a kónusz a csővel, a nyomólap és az öv újrahasználatos eszközök. A leeresztő zacskó az irrigálóhoz egyszer használatos eszköz. A jelen egyszer használatos leeresztő zacskó újrafelhasználása potenciális veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja annak tulajdonságait, így a fizikai sérülés vagy a fertőzés további kockázatát jelentheti a beteg számára.

Az irrigáló szett nem használható, ha hasmenésben szenved.

Figyelem

Az irrigálási eljárás kizárólag az orvos vagy nővér által adott utasításoknak megfelelően végezhető.

Coloplast azt javasolja, hogy ne használja az irrigáló szettet 3 hónapnál tovább.

Javallatok

Az irrigáló szett sztómával élők számára készült irrigálás céljából.

Információ

A Coloplast irrigáló szettet úgy terveztük, hogy az egyszerű irrigáláshoz szükséges alapvető eszközök az ön rendelkezésére álljanak.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

Higiénés okokból az irrigáló szettet csak ugyanaz a személy használhatja. Másokkal ne ossza meg.

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű károkért,