


Katéter  
Hólyag katéter lecsapoló katéterezésre.

Először mossa meg a kezét, és a húgycsőnyílás körüli területet! Ügyeljen arra, hogy a baktériumok ne kerüljenek a kezéről a katéterre.


1. Nyissa fel a zacskót 2-3 cm-es területen a csatlakozó felőli oldalon!



2. Engedjen csapvizet a zacskóba addig, amíg a vízszint el nem éri a csatlakozót. Készítsen elő mindent a katéterezéshez!

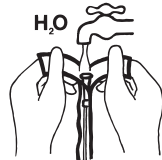

3. A katétert legalább 30 másodpercig vízben kell áztatni. Akassza fel a zacskót egy kampóra, vagy ragassza a tapadóponthoz egy sima felszínhez!

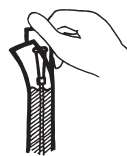

Lehetősége van a katéter merevségének szabályozására. A hideg víz merevebbé, míg a langyos víz hajlékonyá teszi a katétert. Szoros húgycső-záróizom esetén viszonylag merevebb katéter alkalmazása javasolt. Amennyiben a katétert az alkalmazáshoz túlságosan csúszósnak találja, vagy szeretne inkább egy „érintésmentes” módszert alkalmazni, úgy nyissa fel a zacskót az alsó részénél, engedje ki a vizet, hajtsa vissza a csomagolást, és a katétert a csomagoláson keresztül fogva vezesse fel a húgycsőbe.



MIN. 30 SEC.



### Használati útmutató

23315148 Version 2

Coloplast logó Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. © [2013-11]

### Javallat

Steril vizelet-lecsapoló katéter időszakos használatra.

### Információ

Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak. A csomagolás kibontása után a lehető leghamarabb el kell végezni a katéterezést. Amikor a húgycső kiürült, a katétert minden esetben el kell távolítani.

### Vigyázat

Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.

Mielőtt először önkatéterezést végez, kérjen tanácsot kezelőorvosától.

Kérjen tanácsot kezelőorvosától, ha:

- tüneteket tapasztal, úgymint láz, kellemetlen érzés a húgycső ürítésekor, gyakori vizeletelési inger vagy véres vizelet.


### Figyelmeztetés

Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy fertőzés fokozott kockázatával jár.

A termék ftalátokat tartalmaz, és orvosi jóváhagyás nélkül nem alkalmazható gyermekeknél, illetve terhes vagy szoptató nőknél.



4A. (Nők) Vegye ki a katétert a zacskóból. A húgycsőnyíláshoz való hozzáférés érdekében nyissa szét a nagyajkakat egyik kezével. Másik kezével vezesse fel óvatosan a katétert a húgycsőbe. A női húgycső szinte teljesen egyenes, és kb. 3-4 cm hosszú. Amennyiben nincs illemhely a közelben, csatlakoztassa a katétert egy vizeletgyűjtő zsákhoz, és engedje a zsákba a vizeletet.

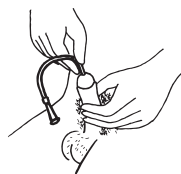

4B. (Férfiak) Vegye ki a katétert a zacskóból. Emelje fel a hímvesszőjét egyik kezével úgy, hogy kiegyenesedjen a húgycső. Másik kezével vezesse fel szakaszosan a katétert a húgycsőbe, hozzávetőlegesen 2 cm-es szakaszokként. A férfi húgycső S alakú, és 15-20 cm hosszú. Mielőtt a katéter a húgycsőbe érne, a záróizom miatt enyhe ellenállást fog érezni. Ne szorítsa a hímvesszőt, mert az nehezebbé teszi a katéter felvezetését. Amennyiben nincs illemhely a közelben, csatlakoztassa a katétert egy vizeletgyűjtő zsákhoz, és engedje a zsákba a vizeletet.



5. Vezesse fel a katétert a húgycsőbe addig, amíg a vizelet folyani nem kezd. A vizeletfolyás befejeződésével húzza ki a katétert 2-3 cm-rel. Ha a vizeletfolyás újra megindul, várjon pár másodpercig, majd húzza még ki a katétert 1-2 cm-rel. Húzza ki a katétert, miután a hólyag kiürült, és dobja el a katétert az egészségügyi előírásoknak megfelelő módon. Amennyiben a katéterhez vizeletgyűjtő zsákot csatlakoztatott, dobja ki azt is a katéterrel együtt. Dönthet úgy is, hogy a vizeletgyűjtő zsák tartalmát a WC-be üríti, és a zsákot a jövőben újra felhasználja.

### Szimbólum



DEHP  
DBP

Ftalátot tartalmaz: di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és dibutil-ftalát (DBP) keveréke



Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.