

## Öntapadó vizeletkondom



Coloplast A/S  
3050 Denmark

IFU10225 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.  
© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

**Figyelem**

Ezen egyszer használatos termék újrafelhasználása kockázatot jelenthet a felhasználó számára. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így nagyobb eséllyel léphet fel fizikai sérülés vagy fertőzés a betegnél.

**Figyelmeztetés**

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért, amelyek a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

**A Conveen öntapadó vizeletkondom használata**

- Vágja le a szeméremszőrzetet, ha szükséges.
- Mossa és szárítsa meg a hímvessző területét.



1. A felnyitáshoz a csomagolást az egyik végétől a másikig tépje fel.



2. Fogja meg a applikátor keskenyebbik végét, és helyezze rá a vizeletkondomot a hímvessző végére.



3. Tartsa kézben az applikátort, miközben a hímvesszőt egy helyben tartja. Másik kezével húzza a papírcsíkot a hímvessző töve felé, legördítve ezáltal a vizeletkondomot, hogy az teljes hosszával a hímvesszőre kerüljön. Győződjön meg arról, hogy a vizeletkondom mindkét vége egyenletesen letekeredett.



4. Dobja ki az applikátort.



5. Enyhén nyomja rá a vizeletkondomot a hímvessző tövére, hogy a bőrhöz tapadjon. Nincs szükség külön ragasztóra.



6. Eltávolításhoz válassza le a vizeletkondomot a vizeletgyűjtő zsákról, és óvatosan tekerje le a hímvesszőről.