

Security+ Vizeletkondom különálló ragasztócsíkkal

Nem latex

Coloplast A/S
3050 Denmark

IFU10350 v.5 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.

© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

Figyelem

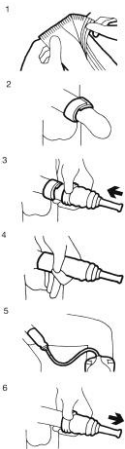
Ezen egyszer használatos termék újrafelhasználása kockázatot jelenthet a felhasználó számára. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így nagyobb eséllyel léphet fel fizikai sérülés vagy fertőzés a betegnél.

Figyelmeztetés

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért, amelyek a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

Javallat

Külső katéter férfiak számára.

A Conveen Security + vizeletkondom különálló ragasztócsíkkal használata

- Vágja le a szeméremszőrzetet, ha szükséges.
- Mossa és szárítsa meg a hímvessző területét.

1. A felnyitáshoz a csomagolást az egyik végétől a másikig tépje fel.

2. Távolítsa el a védőpapírt a ragasztócsík mindkét oldaláról. Óvatosan nyújtsa meg a ragasztócsíkot, hogy az rugalmassá váljon. Helyezze rá a ragasztócsík egyik végét a hímvesszőre, a makk fölé. Húzza meg óvatosan a ragasztócsíkot, és enyhén feszítve tekerje rá a hímvesszőre.

3. Tekerje rá a vizeletkondomot a hímvesszőre a ragasztócsík fölött.

4. Enyhén szorítsa rá a vizeletkondomot a hímvesszőre, hogy az a ragasztócsíkhöz tapadjon. Nincs szükség külön ragasztóra.

5. Csatlakoztassa a vizeletkondomot a Conveen vizeletgyűjtő zsákhoz. A vizeletkondom egy speciális résszel, a kivezetőnyíláson lévő csatlakozógyűrűvel rendelkezik, amely megkönnyíti a vizeletkondom ráhúzását a vizeletgyűjtő zsák csatlakozójára.

6. A vizeletkondom és ragasztócsík 24 órán át lehet a hímvesszőn. Az eszközt tilos újraalkalmazni. Eltávolításhoz tekerje le a vizeletkondomot, a ragasztócsík a kondommal együtt lejjön a hímvesszőről.