

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4200

ÖNHAJTÓS KEREKESZÉK



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy mind a neve, mind a TAJ száma felírásra került a garanciajegyen és a szervizkönyvön. E nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe társadalombiztosítási támogatás!

A javító egységek elérhetőségeit megtalálja a Szervizkönyvben.

TARTALOM

A. Előszó	3
B. Biztonsági utasítások	3
C. Szerkezeti felépítés	4
D. A kerekesszék használata	5
E. Beállítások	7
F. Nyomatékok, biztosítás	7
G. Karbantartás és ellenőrzés	7
H. Műszaki adatok	8
I. Jótállás	9

Jótállási jegy

Szervizkönyv

Biztonságtechnikai nyilatkozat (visszaküldendő)

Regisztrációs lap (visszaküldendő)

A. ELŐSZÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a B-4200 típusú önhajtós kerekesszékekünket. Ez a használati útmutató javaslatokat és biztonsági utasításokat nyújt Önnek, hogy az új kerekesszéke biztonságos és megbízható partnere legyen.

A kerekesszék elsősorban mozgássérült és járóképtelen betegek részére készül szobai és korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra, csapadékmentes időben.

Alkalmazható továbbá kórházakban, rendelőintézetekben, valamint minden olyan intézményben, ahol mozgássérült, ill. helyváltoztatási nehézségekkel küzdő, vagy attól orvosilag eltiltott személyeket (betegeket) kell különböző okok miatt mozgatni.

A használati útmutató képei illusztrációk, arra szolgálnak, hogy Ön könnyen elsajátíthassa a kerekesszék használatát. Az esetleges eltérések a bemutatott képek és az Ön kerekesszéke között nem befolyásolják a használati útmutató érvényességét és az Ön kerekesszékének használhatóságát. Fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

A termék kielégíti a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet (EEC 89/336 illetve EEC 93/42 direktívák) előírásait.

B. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kerekesszék tervezésénél és gyártásánál a maximális biztonságot tartottuk szem előtt. A kerekesszék valamennyi nemzetközi biztonsági előírás követelményeinek megfelel, vagy meghaladja azokat. A nem rendeltetésszerű használat azonban balesetekhez vezethet, ezért a következő utasításokat minden esetben be kell tartani:

- **FIGYELEM!** A kerekesszék javítását, módosítását csak szakember végezheti.
- Általában sík, kemény burkolatú talajon közlekedjen!
- Az első használatkor legyen különösen óvatos, ismerje meg jól a kerekesszék tulajdonságait, viselkedését! Figyelje meg, hogy a súlypontja megváltoztatása hogyan hat a kerekesszékre. Gyakorolja a használatot sík terepen, lejtőn és emelkedőn egyaránt.
- Emelkedőn vagy padkára felfelé történő haladáskor mindig dőljön előre, lejtőn vagy padkáról lefelé történő haladáskor mindig dőljön hátra!
- Ügyeljen rá, hogy a kerekesszék valamennyi kereke a földön legyen.
- Sötétben történő közlekedésnél mindig viseljen világos ruházatot, láthatósági mellényt.
- **FIGYELEM!** A fékek az álló kerekesszék rögzítésére szolgálnak. A mozgó kerekesszék lefékezésére nem használhatók! Egyenetlen vagy lejtős talajon történő megállás után mindig használja a fékeket! Minden esetben mindkét oldalon rögzítse a fékeket.
FIGYELEM! Soha ne tegye az ujját a fékszerkezet elemei és a kerekek közé!
- Amennyiben nem akadálymentesített helyre kíván bejutni, két segítőt vegyen igénybe. A kerekesszéket csak jól rögzített pontoknál, a keretvázat megfogva emeljék. A kerekesszéket csak üres állapotban szabad emelni. Amennyiben a beteg a kerekesszékben ül, csak tolni szabad!
- Használat előtt ellenőrizze a fékeket. A fékek nem működnek, ha a fékek és a kerekek közötti távolság túl nagy.
- A kerekesszék maximális terhelhetőségét (110 kg) mindig vegye figyelembe. Ne terhelje túl a kerekesszéket nehéz hátizsák, csomag, vagy gyermek, állat szállításával.
- 10%-nál meredekebb lejtőn vagy emelkedőn ne használja a kerekesszéket.
- Tilos a kerekesszéket más járművekben ülésnént használni, ha a jármű nincs erre megfelelően kialakítva.
- Ne használja a kerekesszéket sérült hajtókarikával.
- Ne használja a kerekesszékét annak bármely meghibásodása esetén.
- Ügyeljen arra, hogy az ülésről ne lógjon le ruhadarab, sál, táskák stb., ami beleakadhat a kerekékbe.

- Amennyiben a kerekesszéket hosszabb ideig napon tárolják, a felületek felforrósodhatnak, és ez égési sérülésekhez vezethet.
- A kerekesszék gumi és műanyag alkatrészeket is tartalmaz, ezeket a magas hőmérséklet maradandóan károsíthatja. Ezért kérjük, ne állítsa hőforrás, kályha, konvektor közelébe!
- TILOS a kerekesszékben dohányozni, tüzet okozó tevékenységet folytatni!
- TILOS másik személy vagy állat szállítása!
- TILOS gyúlékony és robbanó anyagok szállítása!
- TILOS bármely eszköz vagy állat vontatása!
- TILOS a kerekesszéket megtevesztő világítással ellátni.
- TILOS a kerekesszéket alkoholos állapotban vagy más tudatmódosító szer hatása alatt használni.
- TILOS a hajtókarikát menetközben elengedni.
- TILOS 3 cm-nél magasabb akadállynak nekihajtani, arra felugratni.

Bármilyen rendellenességet észlel a kerekesszék használata során, azonnal forduljon a legközelebbi szakszervizhez!

C. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS




- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Első önbeálló kerék | 6. Háttámla |
| 2. Váz | 7. Ülés |
| 3. Hátsó kerék a hajtókarikával | 8. Lábtartó |
| 4. Rögzítő fék | 9. Vádli tartó szalag |
| 5. Kartámasz | 10. Talptámasz |

D. A KEREKESZÉK HASZNÁLATA

1. **Szétnyitás:** Húzza szét az oldalkereteket 15-20 cm távolságra a kartámaszoknál, majd nyomja le az ülés két széle alatti csövet, amíg azok fel nem ülnek az erre a célra kialakított fészekbe.

FIGYELEM! Soha ne tegye az ujját az ülés és a cső közé kinyitáskor!

Beülés előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az ülés megfelelő, előírt pozícióban van.

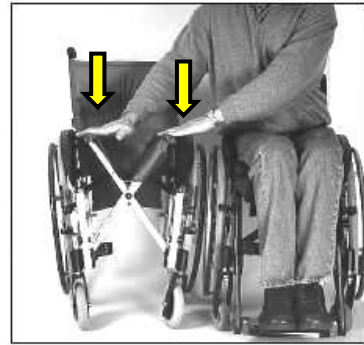

2. **Beülés a kerekesszékre:**

- beülés előtt a rögzítő fékekkel a kerekesszéket rögzíteni kell, majd
- a talptámasz lapokat fel kell hajtani.
- beülés vagy a lábtartók között, mint egy székbe történő leüléssel,
- vagy az egyik kartámasz hátrahajtása után oldalról, - pl.: ágyról - történő "átcsúszással", vagy beemeléssel.

Ezután lehajtjuk a talptámaszokat, feltesszük rá a lábunkat és kiengedjük a fékeket, majd a hajtókarikák segítségével a kerekesszéket mozgásba hozzuk.

3. **Haladás a kerekesszékekkel:** Elindulás előtt (még a rögzítő fékek oldása előtt) meg kell győződni arról, hogy a kerekesszékekkel való közlekedés nem jár-e valamilyen veszéllyel, pl.: nincs-e túl közel lépcsőhöz, járdaszélhez, ami balesetveszélyt rejthet magában.

Elindulás után az első időszakban csak lakásban, és lehetőleg felügyelet mellett ajánlatos közlekedni mindaddig, amíg a kerekesszék mozgását, irányítását, tárgyak mellett való elhaladását és főleg a megállítást, majd rögzítését elsajátítottuk.

A kerekesszék alkalmas a lakásban lévő 2-3 cm magas küszöbön történő áthaladásra is, de ebben az esetben ajánlatos a küszöböt óvatosan megközelíteni.

A szabadtéren való használatot (ami csak különleges esetben történhet) csak az után kíséreljük meg, miután a lakásban való közlekedés teljesen biztonságos. Szabadtéren való közlekedésnél vegyünk igénybe kísérőt, mivel ez különös gondot és fokozott figyelmet igényel. A járdáról való lehajtás ill. felhajtás is segítséggel javasolt.


Ügyeljünk továbbá arra, hogy kerüljük a gidres-gödrös útszakaszokat, valamint a 7°-osnál nagyobb emelkedőket, továbbá a 3°-osnál nagyobb oldallejtőket, ugyanis ezek borulási veszélyt rejtenek magukban. Lefelé haladáskor semmi esetre se engedjük a kerekesszéket felgyorsulni, hanem a hajtókarikát állandóan kézben tartva óvatosan ereszkedjünk.

4. **Kiszállás a kerekesszékből:**

- rögzítsük a kerekesszéket a rögzítő fékekkel,
- a talptámaszokat emeljük fel,
- szálljunk ki a kerekesszékből, vagy
- a kartámasz felhajtásával ülünk (csússzunk) át a másik ülőalkalmatosságra.

5. **Összecsukás:** Hajtsa fel a lábtartót. Fogja meg az üléskárpitot elől és hátul középen, majd húzza felfelé ameddig tudja. A kerekesszéket csukja össze teljesen a kartartók nyitott tenyérrel történő összetolásával. Amennyiben a lehető legkisebbre szeretné összecsukni a kerekesszéket, vegye le a lábtartókat a 7. pontban leírtak szerint.

FIGYELEM! Soha ne tegye ujját a kartartó és az üléstartó cső közé összecsukáskor.

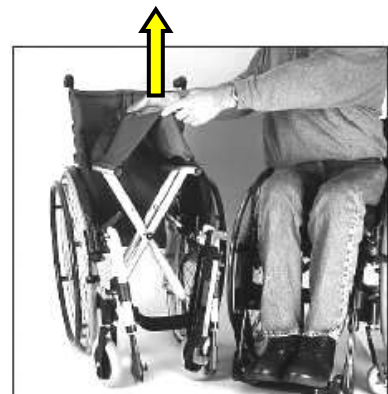

6. **Rögzítő fék:** A kerekesszék két rögzítő fékkel van felszerelve. A fékek közvetlenül a kerekre hatnak. A fék működtetéséhez nyomja előre mindkét fékkart. A fék kiengedéséhez húzza a fékkarokat hátra. A fékhatás csökken a következő eseteknél:

- Lekopott gumimintázat
- Rosszul beállított fékek.

FIGYELEM! A fékek nem üzemi fékek, mozgás közben ne alkalmazza azokat. Fékezzen mindig a hajtókarikával.

Ügyeljen mindig arra, hogy a fék és a kerék közti távolság megfelel az előírtnak.



7. **Lábtartó:** A talptámasz fel- és lehajtható.

TILOS a talptámaszra ráállni!

A lábtartó ki vagy be hajtható. Ehhez a reteszelő kart húzza meg oldva a reteszelést. Hajtsa oldalra a lábtartót.

Szállításhoz a lábtartót le is veheti. Ehhez kb. 90 °-al fordítsa el és amelve le a tartócsapokról.

A lábtartó felszerelésekor fordított sorrendben járjon el. A lábtartó megfelelő pozícióját az automatikusan bepattanó reteszelő kar biztosítja.

FIGYELEM! Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a lábtartó megfelelően reteszelve van! Soha ne tegye ujját vagy kezét a lábtartó mozgó alkatrészei és a váz csövek közé!



8. **Kartámasz:** A kartámasz felhajtható. A felhajtáshoz nyomja előre a rögzítő kart, majd húzza a kartámaszt felfelé.

Lehajtáskor egy erőteljes lefelé történő nyomással biztosítsa, hogy a rugós csap biztonságosan reteszelve a kartámaszt.

FIGYELEM! Figyeljen, hogy ne csípje be az ujját, amikor a kartámaszt le- vagy felhajtja.

Győződjön meg róla, hogy a kartámasz megfelelően rögzítve legyen.

Soha ne emelje a kerekesszéket a kartámaszoknál fogva.

A kartámasz a kerekesszékben történő kényelmes ülés pozíciót szolgálja. Soha ne emelje a kerekesszéket a kartámaszoknál fogva és ne támaszkodjon rá teljes súlyával sem felnyitott, sem lehajtott állapotában!

Ne helyezzen nagyobb tárgyakat maga mellé, mert az befeszítheti az oldallemezt, amely eltörhet és sérüléseket okozhat.

A kartámasz és az oldallemez károsodásának javítása nem része sem a garanciális, sem a társadalombiztosítás által finanszírozott javításnak!



9. **Billentőcső:** Ahhoz hogy, a kerekesszéket a kísérő személy megbillentse, ahhoz kell a billentőcső. Egyszerűen a kísérő lépjen rá a cső végére, így megbillentheti a kerekesszéket és például föltohatja azt egy járdára vagy átsegítheti egy köszöbön.



E. BEÁLLÍTÁSOK

FIGYELEM! A beállítások szakértelmet és gondosságot igényelnek. A nem megfelelő beállítás vagy a biztonsági elemek, csavarok nem megfelelő rögzítése balesethez vezethet! A csavarokat mindig a megadott nyomatékkal kell meghúzni és előírás szerint biztosítani! Amennyiben a beállításokon változtatni szeretne, kérjük, keresse fel a megadott javító, szervizelő partnerünk egyikét.

1. **Fékek:** Beállításhoz oldja ki fékberendezést tartó csavaranyát a vázcső belső oldalán. Ehhez használjon 10 mm-es villás vagy csillag kulcsot. Állítsa be a fékpofa és a kerék közötti távolságot 10 mm-re, majd húzza meg a csavarokat a megadott nyomatékkal (F fejezet). Többszöri beállítás esetén cserélje ki az önzáró anyát egy új, szintén önzáró anyára (M5).



FIGYELEM! A beállítást követően mindig győződjön meg arról, hogy a fékek megfelelően működnek.

2. **Talptámasz magasság:** A talptámaszt talajtól való távolságát fokozatmentesen, 120 mm-es tartományban lehet állítani. Az állításához lazítsa meg a lábtartó csövén lévő rögzítő csavart, ehhez használjon 6 mm-es hatszög belső kulcsnyíláshoz való (imbusz) kulcsot. Helyezze át a talptámaszt, majd rögzítse azt az új pozícióban. A lábtartó talajtól való minimális távolsága 5 cm legyen.



F. NYOMATÉKOK, BIZTOSÍTÁS

A hátsókerék tengelycsavarok meghúzási nyomatéka 10 Nm. A csavarokat minden kioldás és meghúzás után Loctite csavarrögzítővel biztosítani kell. Az összes többi csavarok meghúzási nyomatéka 7 Nm.

G. KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

A használat ideje alatt minden rögzítést rendszeresen ellenőrizni, beállítani, illetve szükség esetén cserélni kell, különös tekintettel a kerekre, fékekre, kartámaszra, valamint a kárpitra. A kárpitot és a vázat rendszeresen tisztítsa. A tisztításhoz semleges mosószer, és kézmeleg vizet használhat. Makacs szennyeződés esetén kefével dörzsölje át a kárpitot, majd törölje szárazra. A váz fényét megőrizheti, ha tisztítás után autóviasszal áttörli.

FIGYELEM! A kárpitot mosógépben mosni, illetve szárító gépben szárítani tilos!

FIGYELEM! A víz károsítja az első- és hátsó kerekek csapágyait. Kerülje a csapadékos időben történő használatot. Ha víz vagy csapadék éri a kerekesszéket, minél hamarabb törölje azt szárazra!

A víz és csapadék okozta korrózióra nem vonatkozik a jótállás.

A következő rendszeres karbantartás és ellenőrzés segítségével lesz a kerekesszék élettartamának meghosszabbításában, illetve a zavartalan működésében.

Havonta: Ellenőrizze a fékek kifogástalan működését és könnyű kezelhetőségét.
Ellenőrizze az összes kerék esetleges kopását és meghibásodását.

3 havonta: Ellenőrizze a csavarkötések tartós rögzítését. Minden a kerekesszékéhez kapcsolódó és a biztonságát szolgáló kötésekét önbiztosító csavarkötésekkel szereltük fel. A biztonsági anyákat csak egyszer alkalmazza. Többszöri alkalmazáskor ezeket az anyákat ki kell cserélni.

Évente: Javasoljuk, hogy kerekesszékét évente ellenőriztesse szakszervizben!

Megsemmisítés: A kerekesszék veszélyes alapanyagot nem tartalmaz. Elhasználódás után a fém vázat a fémgyújtó helyen lehet leadni.

H. MŰSZAKI ADATOK

Beülő szélesség: 40, 43, 46 cm

Teljes szélesség: beülő szélesség + 19 cm.

Összecsukott szélesség: 28 cm

Hossz: 108 cm.

Magasság: 90 cm.

Ülésmagasság: 50 cm.

Ülésmélység: 44 cm

Háttámla magasság: ülőfelülettől 40 cm.

Első kerekek: Ø 180x30 mm PU tömör.

Hátsó kerekek: Ø 24" mm PU tömör.

Keréktengely: M12 fix.

Tömegek kg-ban:

- Lábtartó nélkül: 14,5-16 kg beülő szélességtől függően
- Lábtartó (1 pár): 2 kg

Maximális teherbírás: 110 kg

Tartozék: Használati útmutató a garancia jeggyel, Szervizkönyv.

Pótalkatrészek: a kerekesszék minden egyes részegysége, mint pótalkatrész rendelhető.

I. JÓTÁLLÁS

A jótállási jegy alapján a gyártó az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa gyártott termékre.

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, árszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.

A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következett be (pl.: túlterhelésből),
- a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt következett be, bele értve a csapadék okozta károsodást is,
- a nem megfelelő tárolás miatt következett be,
- balesetből származó sérülésekből következett (pl.: váz sérülése),
- elemi kár, vagy egyéb (rongálás, állat okozta kár, lopás, gondatlanság stb.), az átadás után keletkezett okból következett be.

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának a természetes használatból eredő kopások következtében szükségessé váló után állítások, a gumik (köpeny és tömlő), üléskárpit-, karfakopás és sérülés.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha

1. A terméken a jótállást vállaló szervén kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett.
2. A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
3. A terméket váltott személyek használják, vagy túllépik a használati útmutatóban feltüntetett terhelést.
4. Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
5. A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetészerűen újra használhatóvá válik.

Ha a hiba jellegével kapcsolatban vita merül fel, a gyártó vállalatot terheli a bizonyítási kötelezettség.

Javító egységek

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a **Szervizkönyvben** feltüntetett egységeknél lehetséges.

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:

- az igény bejelentésének időpontját,
- hibajelenséget,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbodott új határidejét,
- a főszervelécek cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlán adatok bejegyzése a jótállás megszüntetését vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY B-4200 típusú Önhajtós kerekesszékhez	TAJ szám:
------	---	-----------

Eladószerző tölti ki!

A vásárlás napja 20..... hó nap.
(hónap betűvel) aláírás (P.H.)

Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

Levágandó jótállási, javítási szelvények

Bejelentés 5 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20..... hó nap. aláírás (P.H.).....	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5 Típus: B-4200 Gyártási szám: Kelt: 20..... hó nap. Eladó aláírás P.H.).....
Bejelentés 4 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20..... hó nap. aláírás (P.H.).....	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4 Típus: B-4200 Gyártási szám: Kelt: 20..... hó nap. Eladó aláírás P.H.).....
Bejelentés 3 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20..... hó nap. aláírás (P.H.).....	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3 Típus: B-4200 Gyártási szám: Kelt: 20..... hó nap. Eladó aláírás P.H.)
Bejelentés 2 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20..... hó nap. aláírás (P.H.).....	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2 Típus: B-4200 Gyártási szám: Kelt: 20..... hó nap. Eladó aláírás P.H.).....
Bejelentés 1 Bejelentett hiba: Elhárított hiba leírása: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Kelt: 20..... hó nap. aláírás (P.H.).....	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1 Típus: B-4200 Gyártási szám: Kelt: 20..... hó nap. Eladó aláírás P.H.).....



A



csoport tagja.

Rehab Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.
Telefon: 06/26 88-62-88
Fax: 06/1 239-4330
www.rehabzrt.hu



Management
System
ISO 9001:2008
Valid until:
2018.12.10

www.tuv.com
ID 9105076580

**A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKŐZ JAVÍTÁSRA
SZERZŐDÖTT PARTNEREI:**

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606
	Tel.: 06/1 783-3869
	Tel.: 06/20 950-4735
	Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137
	Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7196
	Tel.: 06/80 201-276

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jóállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

SZERVIZKÖNYV

..... gyártási számú kerekesszékhez

Az eszközt gyártó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: Önhajtós kerekesszék

Az eszköz típusa: B-4200

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

.....

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Gyártó meghatalmazott képviselője (neve, címe)	A hiba leírása	AZ ELVÉGZETT MUNKA MEGHATÁROZÁSA	A JAVÍTÁS NETTÓ DÍJÖSSZEGE	A JAVÍTÁS IDŐPONTJA / ALÁÍRÁS

Gyártó meghatalmazott képviselője (neve, címe)	A hiba leírása	AZ ELVÉGZETT MUNKA MEGHATÁROZÁSA	A JAVÍTÁS NETTÓ DÍJÖSSZEGE	A JAVÍTÁS IDŐPONTJA / ALÁÍRÁS