

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**  
**B-4200/M**  
**ÖNHAJTÓS KEREKESZÉK**



## TARTALOM

<b>A. Előszó .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Szerkezeti felépítés.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Biztonsági utasítások .....</b>	<b>4</b>
<b>D. A kerekesszék használata.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Beállítások.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Nyomatékok, biztosítás .....</b>	<b>7</b>
<b>G. Karbantartás és ellenőrzés.....</b>	<b>7</b>
<b>H. Műszaki adatok.....</b>	<b>8</b>
<b>I. Jótállás .....</b>	<b>9</b>

Jótállási jegy

Szervizkönyv

Biztonságtechnikai nyilatkozat (visszaküldendő)

Regisztrációs lap (visszaküldendő)

## A. ELŐSZÓ

Tisztelt Vásárlónk!


Köszönjük, hogy megvásárolta a Rehab Zrt. B-4200/M típusú önhajtós kerekesszéket. Ez a használati útmutató használati javaslatokat és biztonsági utasításokat nyújt Önnek, hogy az új kerekesszéke biztonságos és megbízható partnere legyen.

A kerekesszék elsősorban mozgássérült és járóképtelen betegek részére készül szobai és korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra, csapadéktól mentes időben.

Alkalmazható továbbá kórházakban, rendelőintézetekben, valamint minden olyan intézményben, ahol mozgássérült, ill. helyváltoztatási nehézségekkel küzdő, vagy attól orvosilag eltiltott személyeket (betegeket) kell különböző okok miatt mozgatni.

A termék kielégíti a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet (EEC 89/336 illetve EEC 93/42 direktívák) előírásait. Jelen használati útmutatóban szereplő képek és ábrák tájékoztató jellegűek, arra szolgálnak, hogy Ön könnyen el tudja sajátítani a kerekesszék kezelését. Az esetleges eltérések a képek, ábrák és az Ön kerekesszéke között nem befolyásolják a kerekesszék használhatóságát. Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok műszakilag szükségessé válnak.

## B. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

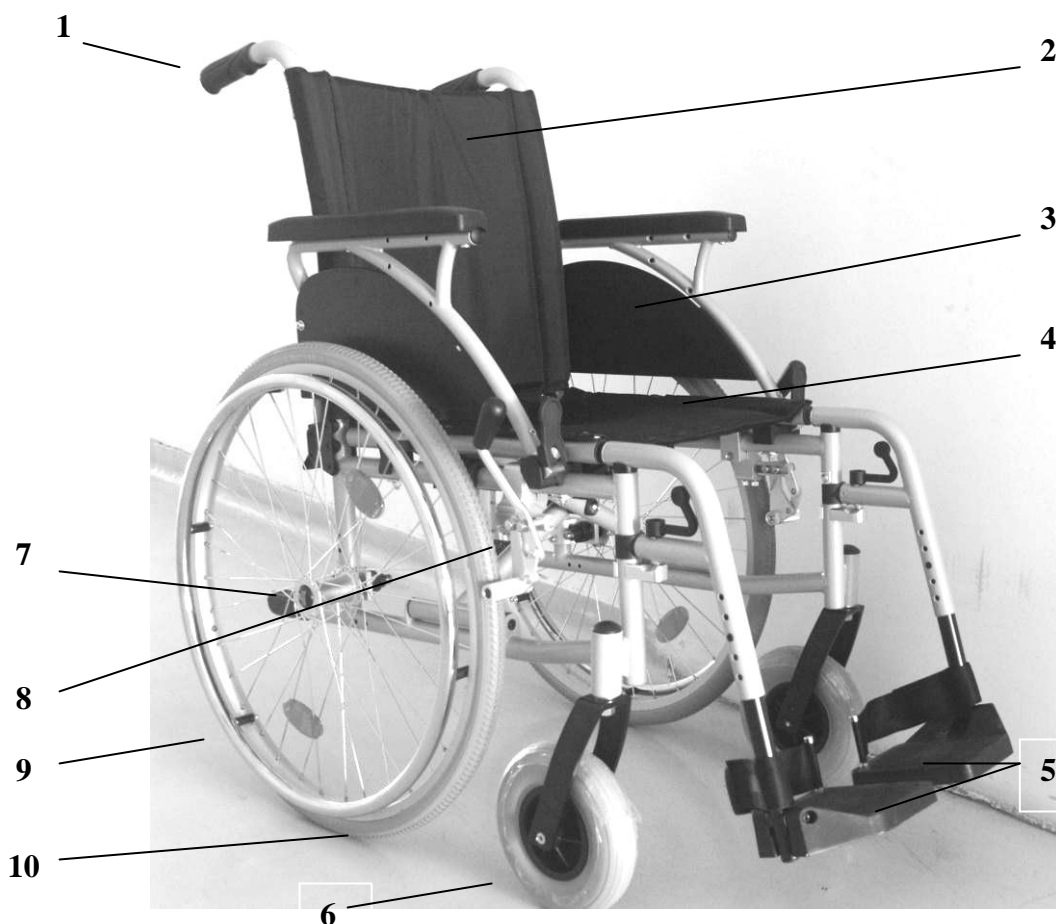

1. Fogantyú
2. Háttámla
3. Oldallemezek
4. Ülészék
5. Lábtartók

6. Önbeálló első kerék
7. Patent tengely
8. Rögzítő fék
9. Hajtókarika
10. Hajtó kerék

## C. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kerekesszék tervezésénél és gyártásánál a maximális biztonságot tartottuk szem előtt. A kerekesszék valamennyi nemzetközi biztonsági előírás követelményeinek megfelel, vagy meghaladja azokat. A nem rendeltetésszerű használat azonban balesetekhez vezethet, ezért a következő utasításokat minden esetben be kell tartani:

- **FIGYELEM!** A kerekesszék javítását, módosítását csak szakember végezheti.
- Általában sík, kemény burkolatú talajon közlekedjen!
- Az első használatkor legyen különösen óvatos, ismerje meg jól a kerekesszék tulajdonságait, viselkedését! Figyelje meg, hogy a súlypont megváltozása hogyan hat a kerekesszékre. Gyakorolja a használatot sík terepen, lejtőn és emelkedőn egyaránt.
- Emelkedőn vagy padkára felfelé történő haladáskor mindig dőljön előre, lejtőn vagy padkáról lefelé történő haladáskor mindig dőljön hátra!
- Ügyeljen rá, hogy a kerekesszék valamennyi kereke a földön legyen.
- Sötétben történő közlekedésnél mindig viseljen világos ruházatot. A fényvisszaverőket ne takarja el.
- **FIGYELEM!** A fékek az álló kerekesszék rögzítésére szolgálnak. A mozgó kerekesszék lefékezésére nem használhatók! Egyenetlen vagy lejtős talajon történő megállás után mindig használja a fékeket! Minden esetben mindkét oldalon rögzítse a fékeket.

**FIGYELEM! Soha ne tegye az ujját a fékszerkezet elemei és a kerekek közé!**

- Amennyiben nem akadálymentesített helyre kíván bejutni, két segítőt vegyen igénybe. A kerekesszék csak jól rögzített pontoknál, a keretvázat megfogva emeljék. A kerekesszék csak üres állapotban szabad emelni. Amennyiben a beteg a kerekesszékben ül, csak tolni szabad!
- Használat előtt ellenőrizze a következőket: Gumik, guminyomás (tömlős kerékkel szerelt változatok esetén) fékek. A fékek nem működnek megfelelően alacsony guminyomás esetén, illetve ha a fékek és a kerekek közötti távolság túl nagy.
- A kerekesszék maximális terhelhetősége 125 kg. Ne terhelje túl a kerekesszék hátizsák, gyermek vagy állatok szállításával.
- 10%-nál meredekebb lejtőn vagy emelkedőn ne használja a kerekesszék.
- Tilos a kerekesszék más járművekben ülésenként használni, közlekedési eszközön benne ülni!
- Ne használja a kerekesszék sérült hajtókarikával.
- Ne használja a kerekesszékét annak bármely meghibásodása esetén.
- Ügyeljen arra, hogy az ülésről ne lógjon le ruhadarab, sál, táska stb.
- Amennyiben a kerekesszék hosszabb ideig napon tárolják, a felületek felforrósodhatnak, és ez égési sérülésekhez vezethet.
- A kerekesszék gumi és műanyag alkatrészeket tartalmaz, ezeket a magas hőmérséklet maradandóan károsíthatja. Ezért kérjük, ne állítsa hőforrás, kályha, konvektor közelébe!
- TILOS a kerekesszékben dohányozni, tüzet okozó tevékenységet folytatni!
- TILOS másik személy vagy állat szállítása!
- TILOS gyúlékony és robbanó anyagok szállítása!
- TILOS bármely eszköz vagy állat vontatása!
- TILOS a kerekesszék megtevesztő világítással ellátni.
- TILOS a kerekesszék alkoholos állapotban használni.
- TILOS a hajtókarikát menetközben elengedni.
- TILOS 3 cm-nél magasabb akadálnak nekihajtani, arra felugratni.

Bármilyen rendellenességet észlel a kerekesszék használata során, azonnal forduljon a legközelebbi szakszervizhez!

## D. A KEREKESZÉK HASZNÁLATA

1. **Szétnyitás:** Húzza szét az oldalkereteket 15-20 cm távolságra a kartámaszoknál, majd nyomja le az ülés két szélé alatti csövet, amíg az ülés és a háttámla feszes nem lesz. Engedje le a lábtartókat a megfelelő magasságba.

**FIGYELEM! Soha ne tegye az ujját az ülés és a cső közé kinyitáskor!**

**Beülés előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően rögzítve van.**



2. **Összecsukás:** Hajtsa fel a lábtartót. Az ülés alatt tépőzárral rögzítet háttámla toldatot oldja ki. Fogja meg az ülésárpítot elöl és hátul középen, majd húzza felfelé ameddig tudja. A kerekesszéket csukja össze teljesen a kartartók nyitott tenyérrel történő összetolásával. Amennyiben a lehető legkisebbre szeretné összecsukni a kerekesszéket, szerelje le a lábtartókat.


**FIGYELEM! Soha ne tegye ujját a kartartó és az ülésárpító cső közé összecsukáskor.**



3. **Rögzítő fék:** A kerekesszék két rögzítő fékkel van felszerelve. A fékek közvetlenül a kerekre hatnak. A fék működtetéséhez nyomja előre mindkét fékkart. A fék kiengedéséhez húzza a fékkarokat hátra. A fékhatás csökken a következő eseteknél:

- Lekopott gumimintázat
- Rosszul beállított fékek esetében.

**FIGYELEM! A fékek nem üzemi fékek, mozgás közben ne alkalmazza azokat. Fékezzen mindig a hajtókarikával. Ügyeljen mindig arra, hogy a fék és a kerék közti távolság megfelel az előírtnak.**

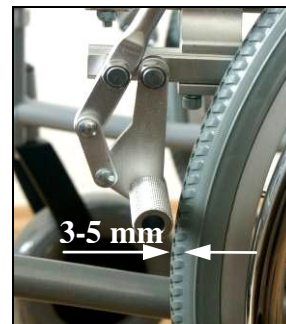


4. **Lábtartó:** A lábtartó talptámasza az ábrán látható módon fel- és lehajtható.

**TILOS a talptámaszra ráállni!** A lábtartó ki vagy be hajtható a reteszelő kar (1) felhúzása után.

A lábtartó levételéhez húzza fel a reteszelő kart (1), majd a lábtartó kb. 90°-al kihajtott pozíciójában levehető. A lábtartó felszerelésekor fordított sorrendben járjon el. A lábtartó megfelelő pozícióját az automatikusan bepattanó retesz (2) biztosítja.

**FIGYELEM! Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a lábtartó megfelelően reteszelve van! Soha ne tegye ujját vagy kezét a lábtartó mozgó alkatrészei és a váz csövek közé!**

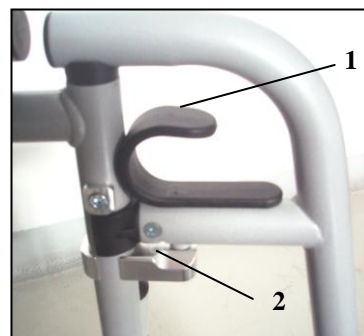


5. **Kartámasz:** A kartámasz hátrahajtható. A hátrahajtáshoz oldja a rögzítő kart (1), majd húzza a kartámaszt hátrafelé.

**FIGYELEM!** Győződjön meg róla, hogy a kartámasz megfelelően rögzítve legyen. Figyeljen, hogy ne csípje be az ujját, amikor a kartámaszt le- vagy felhajtja.

A kartámasz a kerekesszékekben történő kényelmes ülés pozíciót szolgálja. Soha ne emelje a kerekesszéket a kartámaszoknál fogva és ne támaszkodjon rá teljes súlyával sem felnyitott, sem lehajtott állapotában!

Ne helyezzen nagyobb tárgyakat maga mellé, mert az befeszítheti az oldallemezt, amely eltörhet és sérüléseket okozhat.

A kartámasz és az oldallemez károsodásának javítása nem része sem a garanciális, sem a társadalombiztosítás által finanszírozott javításnak!

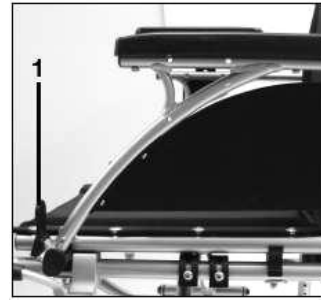

6. **Patent tengely:** A kerekek szerszám nélkül ki- és visszاسzerelhetők. A kerekek a kioldó gomb megnyomásával húzhatók le (1). A kerék visszahelyezésénél a gombot nyomva tartva tolja a kereket ütközésig a helyére. A kioldó gomb elengedésével a gomb alaphelyzetébe kell, hogy visszatérjen.

**FIGYELEM!** Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kerék megfelelően rögzítve van (a kioldógomb benyomása nélkül a kereket ne lehessen kifelé elmozdítani).



7. **Billentőcső:** Ahhoz hogy, a kerekesszéket a kísérő személy megbillentsen, ahhoz kell a billentőcső. Egyszerűen a kísérő lépjen rá a csúszásgátló gumival ellátott cső végére, így megbillentheti a kerekesszéket és például föltohatja azt egy járdára vagy átsegítheti egy köszöbön.



## E. BEÁLLÍTÁSOK

**FIGYELEM!** A beállítások szakértelmet és gondosságot igényelnek. A nem megfelelő beállítás vagy a biztonsági elemek, csavarok nem megfelelő rögzítése balesethez vezethet! A csavarokat mindig a megadott nyomatékkal kell meghúzni és előírás szerint biztosítani!


Amennyiben a beállításokon változtatni szeretne, kérjük, keresse fel a megadott javító, szervizelő bázisunk egyikét.

1. **Fékek:** Beállításhoz oldja ki a csavarokat (1), állítsa be a megfelelő távolságot (lásd.: D. fejezet 3. pont), majd húzza meg a csavarokat a megadott nyomatékkal (F fejezet).


**FIGYELEM!** A beállítást követően mindig győződjön meg arról, hogy a fékek megfelelően működnek.



2. **Talptámasz magasság:** A talptámaszok magasságát fokozatmentesen lehet beállítani. Az állításához csavarja ki a rögzítő csavart (1), helyezze át a lábtartót, majd rögzítse azt az új pozícióban. Ehhez használjon 6 mm-es belső kulcsnyílású (imbusz) kulcsot. A talptámasz a talajhoz 2,5 cm-nél közelebb ne legyen.

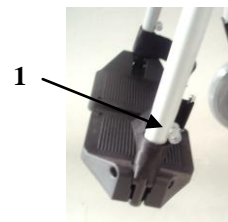


3. **Ülés magasság, súlypont és dőlésszög:** Az ülés magassága és dőlésszöge, valamint a kerekesszék súlypontja az első és a hátsó kerék helyzetének módosításával történhet. Az ülés magasság és dőlésszög állításához oldja, majd vegye ki a rögzítő csavarokat (1), helyezze át az első kereket, illetve a hátsó kerék tengelyház adapterét (A) az alkalmas furatpozícióknak megfelelően, tegye be a csavarokat, majd húzza meg azokat. A súlypont hátrahelyezéséhez a tengelyház adaptert (A) szerelje le az előzőek szerint, cserélje meg a jobb és bal oldalt, majd hátsó állásban szerelje vissza azokat.

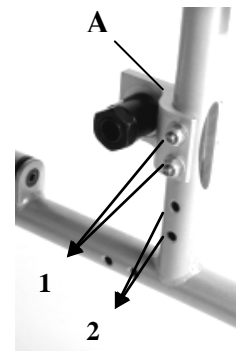

**FIGYELEM!** *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a kerekek biztonságosan rögzítve vannak.*

4. **Üléskárpit feszesség:** A csavarok (1) feloldásával, majd a kárpit feszítése-lazítása utáni meghúzásával módosítani tudja a kárpit feszességét.

**FIGYELEM!** *A biztonság érdekében a tépőzár összfelületének 50% -a kell, hogy legyen rögzítve.*

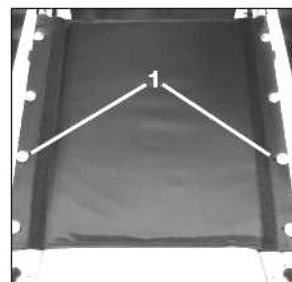

## F. NYOMATÉKOK, BIZTOSÍTÁS

A képen látható csavarok, a hátsókerék tengelyház adapter és tengelyház csavarok meghúzási nyomatéka 10 Nm. A csavarokat minden kioldás és meghúzás után Loctite-vel újra rögzíteni, biztosítani kell.

Az összes többi csavarok meghúzási nyomatéka 7 Nm.



## G. KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

A használat ideje alatt minden rögzítést rendszeresen ellenőrizni, beállítani, illetve szükség esetén cserélni kell, különös tekintettel a kerekekre, fékekre, kartámaszra, valamint a kárpitra. A kárpitot és a vázat rendszeresen tisztítsa. A tisztításhoz semleges mosószert, és kézmeleg vizet használhat. Makacs szennyeződés esetén kefével dörzsölje át a kárpitot, majd törölje szárazra. A váz fényét megőrizheti, ha tisztítás után autóviasszal áttörli.

**FIGYELEM!** *A kárpitot mosógépben mosni, illetve szárító gépben szárítani tilos!*

A következők rendszeres karbantartása és ellenőrzése segítségére lesz a kerekesszék élettartamának meghosszabbításában, illetve a zavartalan működésében:

**Havonta:** Ellenőrizze a fékek kifogástalan működését és könnyű kezelhetőségét. Ellenőrizze az összes kerék esetleges kopását és meghibásodását.

**2 havonta** A tengelyeket enyhén varrógépolajjal olajozza be.

**3 havonta:** Ellenőrizze a csavarkötések tartós rögzítését. Minden a kerekesszékéhez kapcsolódó és a biztonságát szolgáló kötésekét önbiztosító csavarkötésekkel szereltük fel. A biztonsági anyákat csak egyszer alkalmazza. Többszöri alkalmazáskor ezeket az anyákat ki kell cserélni.

**Évente:** Javasoljuk, hogy kerekesszékét évente ellenőriztesse szakszervizben!

**Megsemmisítés:** A kerekesszék veszélyes alanyagot nem tartalmaz. Elhasználódás után a fém vázat a fémgyűjtő helyen lehet leadni.

**FIGYELEM! A homok, csapadék és a tengervíz, télen a só károsíthatja az első- és hátsó kerekek csapágyait. Mossa át és tisztítsa meg kerekesszékét, keréktengelyeket az ilyen igénybevételű használat után.**

## **H. MŰSZAKI ADATOK**

**Beülő szélesség:** 38, 41, 44, 47, 50 cm

**Teljes szélesség:** beülő szélesség + 18 cm (standard kerék és hajtókarika).

**Összecsukott szélesség:** standard kerékkal 33 cm, kerék nélkül 17cm.

**Hossz:** 100 cm.

**Magasság:** 95 cm.

**Ülésmagasság:** standard beállítással 51 cm.

**Háttámla magasság:** ülőfelülettől 43 cm.

**Első kerekek:** Ø 200 mm tömör.

**Hátsó kerekek:** Ø 24” mm tömör.

**Keréktengely:** patent tengely.

**Súlyok kg-ban:**

- Lábtartó nélkül (24 ” hajtókerékkal) 16,5 kg-tól
- Lábtartó (1 pár) 1,5 kg
- Szabvány-oldalrész 1,8 kg

**Maximális teherbírás: 125 kg**

**Tartozék:** Használati útmutató a garancia jeggyel.

**Pótalkatrészek:** a kerekesszék minden egyes részegysége, mint pótalkatrész rendelhető.

Külön rendelhető (opció): hosszabbított, állítható kartámasz



## **I. JÓTÁLLÁS**

A jótállási jegy alapján a REHAB Zrt. az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa gyártott termékre.

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.

### **A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:**

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következett be (pl.: túlterhelésből),
- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt következett be (lábtartó, kartámasz, oldallemez törése, stb.), és bele értve a nem megfelelő út és időjárási viszonyok közötti használatot is,
- a nem megfelelő tárolás miatt következett be,
- balesetből származó sérülésekből következett (pl.: váz sérülése),
- elemi kár vagy egyéb (rongálás, kárpitsérülés, állat okozta kár, lopás, gondtalanság stb.), az átadás után keletkezett, nem a kerekesszék hibájára visszavezethető károk, meghibásodások.

### **Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának:**

- a természetes használatból eredő kopások (pl.: kárpit, gumik, kerekek stb.),
- a természetes használat során szükségessé váló után állítások.

### **Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha**

1. A terméken a jótállást vállaló szerven kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett.
2. A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
3. A terméket váltott személyek használják (pl.: intézményi felhasználás), vagy túllépik a használati útmutatóban feltüntetett terhelést.
4. Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
5. A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

### **A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.**

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá válik.

Ha a hiba jellegével kapcsolatban vita merül fel, a gyártó vállalatot terheli a bizonyítási kötelezettség.

### **Javító egységek**

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a **Szervizkönyvben** feltüntetett egységeknél lehetséges.

**Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:**

- az igény bejelentésének időpontját,
- hibajelenséget,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbodott új határidejét,
- a főszervelécek cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszüntetését vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

**A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet  
a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási  
támogatás igénybevételével vásárolta!**

Név:	<b>JÓTÁLLÁSI JEGY</b>	TAJ szám:
	<b>B-4200/M típusú Önhajtós kerekesszékhez</b>	

### Eladószerv tölti ki!

A vásárlás napja 20..... hó ..... nap. ....  
 ( hónap betűvel) ..... aláírás (P.H.)

Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

Levágandó jótállási, javítási szelvények

Bejelentés ..... <b>5</b>	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>5</b>
Bejelentett hiba: .....	Típus: <b>B-4200/M</b>
Elhárított hiba leírása: .....	Gyártási szám: .....
A jótállás új határideje: .....	Kelt: ..... 20..... hó ....
Munkalapszám: .....	Eladó ..... aláírás
Kelt: .....	20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....
20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	
Bejelentés ..... <b>4</b>	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>4</b>
Bejelentett hiba: .....	Típus: <b>B-4200/M</b>
Elhárított hiba leírása: .....	Gyártási szám: .....
A jótállás új határideje: .....	Kelt: ..... 20..... hó ....
Munkalapszám: .....	Eladó ..... aláírás
Kelt: .....	20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....
20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	
Bejelentés ..... <b>3</b>	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>3</b>
Bejelentett hiba: .....	Típus: <b>B-4200/M</b>
Elhárított hiba leírása: .....	Gyártási szám: .....
A jótállás új határideje: .....	Kelt: ..... 20..... hó ....
Munkalapszám: .....	Eladó ..... aláírás
Kelt: .....	20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....
20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	
Bejelentés ..... <b>2</b>	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>2</b>
Bejelentett hiba: .....	Típus: <b>B-4200/M</b>
Elhárított hiba leírása: .....	Gyártási szám: .....
A jótállás új határideje: .....	Kelt: ..... 20..... hó ....
Munkalapszám: .....	Eladó ..... aláírás
Kelt: .....	20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....
20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	
Bejelentés ..... <b>1</b>	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>1</b>
Bejelentett hiba: .....	Típus: <b>B-4200/M</b>
Elhárított hiba leírása: .....	Gyártási szám: .....
A jótállás új határideje: .....	Kelt: ..... 20..... hó ....
Munkalapszám: .....	Eladó ..... aláírás
Kelt: .....	20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....
20..... hó .... nap. .... aláírás (P.H.).....	



A



csoport tagja.

**Rehab Zrt.**  
**2000 Szentendre, Kalászi út 3.**  
**Telefon: 06/26 88-62-88**  
**Fax: 06/1 239-4330**  
**[www.rehabrt.hu](http://www.rehabrt.hu)**

**A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKŐZ  
JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:**

**SZERVIZKÖNYV**

..... gyártási számú kerekesszékhez

**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

**REHAB-GENERAL KFT.**

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606
	Tel.: 06/1 783-3869
	Tel.: 06/20 950-4735
	Tel.: 06/30 465-7139

**REHAB-HUNGARIA KFT.**

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

**PRÍMA PROTETIKA KFT.**

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137
	Tel.: 06/20 952-2135

**PROMOBIL ZRT.**

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7196
	Tel.: 06/80 201-276

**Figyelem!**

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jóállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: Önhajtós kerekesszék

Az eszköz típusa: B-4200/M

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

Kiadva:

Név: .....

TAJ szám: .....

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja: .....

**Figyelem!**

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Gyártó meghatalmazott képviselője (neve, címe)	A hiba leírása	AZ ELVÉGZETT MUNKA MEGHATÁROZÁSA	A JAVÍTÁS NETTÓ DÍJÖSSZEGE	A JAVÍTÁS IDŐPONTJA / ALÁÍRÁS

Gyártó meghatalmazott képviselője (neve, címe)	A hiba leírása	AZ ELVÉGZETT MUNKA MEGHATÁROZÁSA	A JAVÍTÁS NETTÓ DÍJÖSSZEGE	A JAVÍTÁS IDŐPONTJA / ALÁÍRÁS

VISSZAKÜLDENDŐ!

Cím:  
Rehab Zrt.  
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: +36 26/88-62-88

*Melléklet a Használati útmutatóhoz*

Biztonságtechnikai nyilatkozat a  
**B-4200/M**  
**ÖNHAJTÓS KEREKESZÉKHEZ**

Alulírott.....tulajdonos (gondnok)

kijelentem, hogy a .....számú kerekesszékhez a  
mellékelt Használati útmutatót, érvényesített Jótállási jegyet, valamint a Szervizkönyvet  
átvettem.

A Használati útmutatóban foglaltakat megismertem, s a használat során azokat  
maradéktalanul betartom.

Dátum .....

.....  
átadó

.....  
üzemeltető (tulajdonos/gondviselő/gondnok)

**REGISZTRÁCIÓS LAP**

Név: .....

Lakcím:.....

Telefonszám:.....

TAJ-szám:.....

Vény vonalkód:.....

Közgyógy. ig. szám:.....

Típus: B-4200/M

Gyártási szám:.....

Méret:.....

Kiszolgálás dátuma:.....

Kiszorgálta:

.....