

## 5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



Management System  
ISO 9001:2008  
Valid until:  
2016.12.10  
www.tuv.com  
ID: 9105076580

**REHAB Zrt.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**B-4301**



### WC/mosdó Oldaltámaszos kapaszkodó

#### 1. Felhasználási terület

A B-4301 típusú WC/mosdó kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, WC) végzett tevékenység, felállás és leülés biztonságosabbá tételére szolgál. Használata olyan helyeken javasolt, ahol nincs megfelelő falfelület a kapaszkodó oldalirányú rögzítésére, ezért oldalsó támasztóláb szükséges az oldalirányú terhelés felvételére. Jobbos- és balos kivitelben készül. A terméket úgy kell kiválasztani, és felszerelni, hogy a támasztóláb a használt résztől kifelé álljon. Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

#### 2. Műszaki adatok

A termék egy méretben, jobb- és bal oldali kivitelben készül.

##### **Méretek:**

Funkcionális magasság (csőközép):	750 mm
Láb távolság a faltól (csőközép):	700 mm
Csőátmérő:	25 mm
Teljes magasság:	785 mm
Teljes kinyúlás a faltól:	735 mm
Teljes szélesség a támasztó lábnál:	248 mm
Termék súlya:	2,1 kg
Maximális terhelhetőség:	100 kg

##### **Tartozékok**

6 db 6x50 mm-es D-fejű felfogó csavar

6 db K 10 típusú KOELNER dübel

6 db. M6 alátét

### 3. Szerelési útmutató:

Kapaszkodóink elsősorban nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC) történő közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálják. Mivel ezek a helyiségek fokozottan balesetveszélyesek (nedves, csúszós, kemény padló- és falburkolat), különösen fontos a kapaszkodók megfelelő felszerelése és rögzítése. A rögzítő furatok helyét fúrás előtt célszerű a talplemezről a falfelületre átjelölni.

A fúrás ne a talplemezen keresztül történjen, mert a termék korrózióvédelmét biztosító műanyag bevonat megsérülhet.

A kapaszkodó rögzítéséhez nem lehet általános érvényű útmutatást adni a különböző falszerkezetek anyagának és vastagságának sokfélesége miatt. A rögzítés módját a falszerkezettől függően egyedileg kell megválasztani. Az általunk mellékelt műanyag dübel és facsavar csak megfelelő szilárdságú téglá- vagy betonfal esetén nyújt biztonságos rögzítést. Kisebb szilárdságú falakhoz (pl. vályog, gázbeton stb.) ez a típusú dübel nem alkalmazható.

#### **Javasoljuk a szerelést, bízva szakemberre!**

A falburkolat védelme érdekében a furatok elkészítése után, a kapaszkodó és a falburkolat egymáshoz illeszkedő felületeit gondosan meg kell tisztítani, mert a köztük maradó törmelékcszemcsék a csavarok meghúzásakor a csempeburkolatot elrepeszthetik.

**Az egyenes felfekvés és a nedvesség elleni védelem érdekében a felfekvő felületek közé vékony rétegben gumiám vagy szilikon masszát kell kenni.** A masszából kenjük vékony rétegben az alátétek alá is, hogy a csavar meghúzásakor esetleg megsérülő felületnél ne induljon el korróziós folyamat. Megszilárdulás után a felületek közül kinyomódott massa könnyen eltávolítható.

A rögzítő csavarokat úgy kell meghúzni, hogy a kapaszkodó szilárdan álljon.

### 4. Karbantartás:

#### 4.1. Tisztítás

A kapaszkodó minden része a háztartásban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható.

#### 4.2. Karbantartás

A kapaszkodó nem rozsdamentes alapanyagból készül, ezért érzékeny a festék réteg megsértésére, és az állandó nedves környezetre. A korrózió elkerülése érdekében ne sértse meg a festékréteget. A vizes helyiséget a páradús tevékenység (mosás, szárítás, fürdés stb.) után szellőztesse ki és a kapaszkodót száraz ronggyal törölje át.

A rögzítéseket időszakonként ellenőrizni, illetve után húzni szükséges.

#### 4.3. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

#### FIGYELEM!

- Kilazult rögzítő csavarokkal a kapaszkodó nem használható! Kiszakadás és elhajlás veszély állhat fenn!
- Elhajlott, elengedett hegesztésű kapaszkodó nem használható! Billenésveszély!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- A kapaszkodót a megadott tartozékokkal, vagy erősebbel (szükség alapján) kell felszerelni. Rövidebb csavar nem használható!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!

Kivitel:

Bal oldali



Jobb oldali



**A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**