

## Sala-Med Adaptálható hasi sérvkötő



Férfi				
Méret	1	2	3	4
első rész magassága	28 cm	28 cm	28 cm	30 cm
derékbőség	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm
csípőbőség	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm

Női					
Méret	1	2/A	2/B	3/A	3/B
első rész magassága	26 cm	28 cm	30 cm	28 cm	30 cm
derékbőség	60-70 cm	70-80 cm	70-80 cm	80-90 cm	80-90 cm
csípőbőség	80-90 cm	90-100 cm	90-100 cm	100-110 cm	100-110 cm

Méret	4/A	4/B	5/A	5/B	6/A	6/B	7
első rész magassága	32 cm	34 cm	32 cm	34 cm	36 cm	40 cm	40 cm
derékbőség	90-100 cm	90-100 cm	100-110 cm	100-110 cm	110-120 cm	110-120 cm	120-130 cm
csípőbőség	110-120 cm	110-120 cm	120-130 cm	120-130 cm	130-140 cm	130-140 cm	140-150 cm

## Használati utasítás

### Javaslat:

A haskötő a has külső kóros alakváltozásait (lógó has, külső hasi sérvek) és belső zsigeri szervek vándorlásait (zsigeriptosis) korrigálja, amikor a lógó has emelésére és tartására, illetve a hasfal és a zsigerek természetes helyzetének lehető visszaállítására törekszik.

### A haskötő rendeltetése:

1. Hashártyán belüli és mögötti szerveknek: gyomor-bélrendszer, máj, vese stb. süllyedése, vagy annak megelőzése.
2. Különböző nagyságú lógó has.
3. Hasfali és köldöksérv, hasi műtét utáni hasfal gyengeség.
4. Terhesség, szülés utáni petyhüdt hasfal esetére.

### Felvétele és használata:

Az adaptálható haskötőt fekvő, vagy álló állapotban lehet felvenni, úgy, hogy a jobb oldalon lévő tépőzárát összekapcsoljuk. Amennyiben mossuk, vagy nem használjuk a haskötőt úgy a tépőzárakat összenyomva tartjuk, így meghosszabbíthatjuk a tépőzárak időtartamát.

### Tisztítás:

Mosása kézzel vagy automata mosógéppel, 40 °C fokon, enyhébb hatású mosószerrel ajánlott. Szárítás szobahőmérsékleten. Csavarni tilos! Ha szükséges, a hasrész vasalható.

Nyilatkozat a 47/1999.(X.6.)EüM. Rendelet 8.sz. melléklete szerint

A 2.1 pont a),b),c) és d) alattiak értelemszerű leírását követően:

- a Gyártó nyilatkozik, hogy a fentiek szerint specifikált terméke az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet 1. sz. mellékletében (osztályba sorolt eszközök) felsorolt és rá vonatkoztatható Alapvető Követelmények mindegyikét teljes mértékben kielégíti.

A vásárló ill. a gyártó jogait, kötelezettségeit a 151/2003.(IX.22.) sz. Kormányrendelet szabályozza.

TB által támogatott termék, kihordási ideje: 12 hónap / 2 db.

Kérjük, hogy a használati útmutatót a kihordási idő leteltéig megőrizni szíveskedjék.

Minőségi kifogást az útmutató és számla ellenében fogadunk el.

**EEKH engedély szám: 485/2010/OTIG**

**Orvostechnikai Hivatal regisztrációs száma: 35144/2002**

### Gyártó: Sala-Med Kft.

1184 Budapest, Üllői út 372.

Tel.: 06 1 281 3376

E-mail: info@salamed.hu

www.salamed.hu