




## Adaptálható hasi sérvkötő, normál

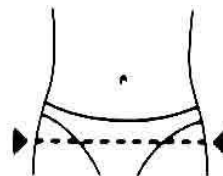

### Termék felvétele:

A haskötő felvétele mindig ruha alá történik.

Az övet körbevezetjük a derékon, megfelelő mértékig megfeszítjük, majd a tépőzárak összenyomásával rögzítjük a hason.

Ahhoz, hogy a termék hatása megfelelő legyen, felvételkor erőteljesen meg kell feszíteni az övet.

### Kezelési útmutató:

Az eszköz levétele után ajánlott a tépőzárakat összezárni, hogy ne telítődjenek idegen anyaggal.

Mosása kézzel meleg vízben, enyhébb hatású mosószerrel.

Mosógép és centrifuga használata nem ajánlott.

Nem vasalható.

Vegyileg nem tisztítható.

### Alapanyaga:

76 % poliamid

13 % pamut

11 % gumiszál

**Eszköz kihordási ideje:** 12 hónap

### ORTETIKA KFT.

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 149.

Tel.: (26) 331-201, (26) 331-145, (26) 331-171

Fax: (26) 530-319

E-mail: ortetika@t-online.hu

www.ortetika.hu



T A G J A



ISO 9001:2015