

# Használati útmutató



## Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)

### **Az eszköz rendeltetése:**

A termék egy oldali sérv (lágycék, comb, here) helyén tartását szolgálja.  
Anyaga: drill vászon.

### **A termék főbb részei:**

A termék pántokból és un. pelottából (nyomópárna) áll, amely a sérvet a helyén tartja.

### **Alkalmazás, használat:**

Fehérnemű fölött kell viselni. A sérvet először vissza kell helyezni, amelyet fekvő helyzetben végezzen. A pelottát a sérvkapura kell helyezni, majd a sérvkötő rögzítőjét a derékon végigvezetve a tépőzárral rögzíteni kell. A pelottát alulról a combok között végigvezetett rögzítő biztosítja.

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

A termék csak kézzel mosható, alacsony fokon vasalható, fűtőtesten nem szárítható. A mosás előtt a pelottát ki kell venni.

### **Figyelmeztetések:**

Nem szabad a sérvkötőt túlságosan szorosra húzni, csak annyira, hogy a sérvet biztonságosan a helyén tartsa.

Csak abban az esetben használható, ha a sérvet teljesen vissza lehet helyezni. Első ellátásnál kérje orvosi személyzet segítségét a helyes használat elsajátításához.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### **Garancia:**

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.