


1b. Ábra. A sérvkötő felvétele, bal oldali sérv esetén.



2. Ábra. Két oldali lágyéksérvkötő.

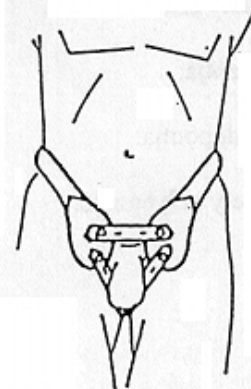

GYSGY REHA Kft.

1149 Budapest, Pillangó u.12

Tel: 329-0026,330-7735, Fax: 330-7770

[www.gysgy.hu](http://www.gysgy.hu), E-mail: [info@gysgy.hu](mailto:info@gysgy.hu)

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő

### **1., Általános ismertetés, használat**

Kis lágyéksérv esetén amennyiben a beteg nem műthető, illetve műtét után gyenge hasfali izomzat a recidiva megakadályozása céljából alkalmazható.

### **2., Felvétele és használata**

A lágyéksérvkötő méretsorozatban készül. Felvétele kisebb sérvek esetén álló helyzetben, nagyobb sérvek esetén fekvő helyzetben a sérv(ek) visszahelyezése után meztelen testre történjék. (ábrák 1., a., b., c., 2.,)

A sérvkötő párnát mindig abba a kézbe kell venni, amelyik oldalon van a sérv. Ezután a sérvkötő pelottát és a rugót két kézbe véve helyezzük fel a csípőtájékra.

A deréköv végén lévő bőrszíjat a pelottán lévő felső gombra, a combszalagot a lábak között átvezetve a pelotta alsó gombjára kapcsoljuk.

A sérvkötő rögzítését úgy kell beállítani, hogy fájdalommentesen szorítsa a sérvkötő párnáját a sérvkapura.

A sérvkötő felkapcsolása után egy-egy erőteljes köhögéssel győződjünk meg a párna tökéletes zárásáról.

A sérvkötőt általában éjszakára le kell venni, mert a bőrnek szüksége van regenerálódásra a felfekvés elkerülése végett.

### **3. Tisztítása**

A sérvkötő tisztán tartása nagy gondot igényel. Óvni kell a nedvességtől, vízben mosni tilos. A készüléket benzines ruhával lehet tisztítani a tűzrendészeti előírások betartásával.

### **4., Jótállás:**

A GYSGY REHA Kft. a termék rendeltetésszerű használata mellett 12 hónap jótállást biztosít. A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni

### **5., Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat:**

A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

.....

MEO



**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A  
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A  
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG  
MEG KELL ŐRIZNI !**