

Használati útmutató



Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)

Az eszköz rendeltetése:

A termék két oldali sérv (lágycék, comb, here) helyén tartását szolgálja.

Anyaga: drill vászon.

A termék főbb részei:

A termék pántokból és un. pelottából (nyomópárna) áll, amely a sérvet a helyén tartja.

Alkalmazás, használat:

Fehérnemű fölött kell viselni. A sérvet először vissza kell helyezni, amelyet fekvő helyzetben végezzen. A pelottát a sérvkapura kell helyezni, majd a sérvkötő rögzítőjét a derékon végigvezetve a tépőzárral rögzíteni kell. A pelottát alulról a combok között végigvezetett rögzítő biztosítja.

Karbantartás, állagmegóvás:

A termék csak kézzel mosható, alacsony fokon vasalható, fűtőtesten nem szárítható. A mosás előtt a pelottát ki kell venni.

Figyelmeztetések:

Nem szabad a sérvkötőt túlságosan szorosra húzni, csak annyira, hogy a sérvet biztonságosan a helyén tartsa.

Csak abban az esetben használható, ha a sérvet teljesen vissza lehet helyezni. Első ellátásnál kérje orvosi személyzet segítségét a helyes használat elsajátításához.

Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártó / Forgalmazó: Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.

Jótállási jegy

Kiadás helye:

Kiadás ideje:

Gyártási szám:

P.H.

A termékre az Ortoprofil Kft., a 151/2003 (IX.22) kom. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról értelmében 12 hónap jótállást vállal, amelynek kezdete a kiszolgálás / átadás napja. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait. Jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti.