



GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ PRIMA-PROTETIKA KFT.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő

Gyártási szám:

Megrendelő neve:

címe:

Megrendelő TAJ száma:

Termék átadásának kelte: 20..... év hó nap

Felíró orvos neve:

Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!

EAN kód címke:

Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pavilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egézségsarok	Tel: 20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pacsirta u.1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pacsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax: 76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u.83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szerviz, javítás stb.).

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

Nagykereskedelmi lerakat:

5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1. Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.

PRIMA-PROTETIKA Kft.

„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

A tájékoztatót készítette: Droppa Éva
Jóváhagyta: Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő
A vásárlói tájékoztató kiadva: 2016. április 10.

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

1. Általános ismertetés

Az Ön által megrendelt adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő az emberi test anatómiájának figyelembe vételével, és a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján társadalombiztosítási támogatással, orvosi rendelvényre került átadásra. A sérvек teljes visszahelyezhetősége esetén javasolt az alkalmazása.

2. Használat

Helyes felvételét meg kell tanítani.

Minden esetben vegye figyelembe és tartsa be a szakorvos, illetve szakember utasításait.

Felvétel: A sérvkötő felvételét fekvő helyzetben célszerű végezni, a sérvек visszahelyezése után. A sérvpelottákat a testre rögzítő deréköv, valamint a combszalagok szíjvégződése szabályozhatóan kapcsolódik a sérvpelottába erősített gombokra. A sérvkötő fixálása előtt a kitüremkedést vissza kell helyezni a sérvkapun!

Figyelem! Csak a teljesen visszahelyezhető sérvек esetén viselhető! Nem teljesen visszahelyezhető sérv esetén a használata a kizáródás veszélyét fokozza!

3. Műszaki leírás

A sérvkötőt nyomópárnás pelottával ellátott erős gumiöv szorítja a sérvекre. A pontos rögzítés és állíthatóság érdekében combszalaggal, csatolószíjjal, illetve tépőzárral készül.

Minden esetben adaptálása szükséges!

4. Tisztítás

Ajánlott 40 °C foknál nem melegebb vízben, szintetikus mosószerrel mosni.

Tilos 40 °C foknál melegebb vízben, mosógépben, lúgos, szappanos vízben mosni, súrolni, majd csavarni, tűz mellett, vagy forró fűtőtesten szárítani!

Tárolás: a sérvkötőt szobahőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen tároljuk.

Sugárzó hőtől óvjuk!

5. Minőségtanúsítás

EEKH regisztráció (071) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14

EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

OEP által támogatott termék.

6. Megfeleléségi nyilatkozat

Termékünk, melyre a megfeleléségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkozatható alapvető követelmények mindegyikét.

Kedves vásárlónk!

Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!

.....