

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

Kiszolgáló hely bélyegzője

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

46/508-283

3300 Eger, Knézych Károly u. 20.

36/320-826

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.

35/300-224

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

47/560-130

3600 Ózd, József Attila u. 31/A

48/569-239

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÓTÁLLÁSI JEGY AJ-452 Térd ortézis

Méret táblázat

Méret sorozat
S
M
L
XL
XXL

1. Általános ismertetés, használat:

A térdtok laminált kelméből készül, melyet rádolgozott ízületes sín váz merevít. Az ízület, a térd flexiós és extenziós mozgásának megfelelően szabad mozgásterjedelmű. A comb illetve a lábszár részen egy-egy elasztikus, széles tépőzárból készült rögzítő bandázs helyezkedik el.

2. Javallat

Alkalmazható kismértékű térdízületi lazaság, pl.: menisectomia után, a keresztzalag megnyúlásakor, valamint traumás térdkalácsficam során, leginkább oldalirányú instabilitás esetén.


3. Felvétele és használata

Az eszközt első alkalommal szakember adaptálja, beállítja, és megtanítja annak helyes használatát. Ennek során beállításra kerül a beépített sínezet annak érdekében, hogy pontosan kövesse a térd kontúrját, így elősegítve annak megfelelő és kényelmes működését. A további használatkor meglazítjuk a rögzítő bandázsokat, majd a beépített sínezettel együtt a térden megfelelő pozícióba húzzuk, majd a bandázsok megfeszítésével és becsatolásával rögzítjük.

4. Tisztítás

A mosása kézzel vagy mosógépben 40c-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel történhet, miután a sín vázakat kivették a tokból. Visszahelyezéskor ügyelni kell arra, hogy a sín váz ugyanoda, és ugyanabba a pozícióba kerüljön vissza, ahogy eredetileg volt.

Vasalni, centrifugálni, forró fűtőtesten szárítani tilos!

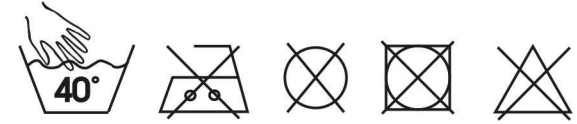

5., Szavatosság:

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

6. Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat:

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG MEG
KELL ŐRIZNI!**

