

Használati útmutató



Pavlik hám (Ortoprofil)

Az eszköz rendeltetése:

Csípő veleszületett subluxatiója, instabil csípő, csípő egyéb deformitása, csípő dysplasiája esetén.

A termék főbb részei:

A termék különböző kengyelekből áll. Tartalmaz egy derékövet és két lábkengyelt.

Alkalmazás, használat:

A derékövet a derék köré kell csatolni, a két kengyelt a lábakra kell tépőzárezni. A lábkengyelek szalagjait a deréköv csatjain át kell bújtatni, majd meghúzni.

Használata alatt rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges.

Karbantartás, állagmegóvás:

Kézzel mosható.

Figyelmeztetések:

Tartsa be a kezelőorvos utasításait.

Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használt esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártó / Forgalmazó: Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.

Jótállási jegy

Kiadás helye:

Kiadás ideje:

Gyártási szám:

P.H.

A termékre az Ortoprofil Kft., a 151/2003 (IX.22) kom. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról értelmében 12 hónap jótállást vállal, amelynek kezdete a kiszolgálás / átadás napja. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait. Jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti.