

Használati útmutató



Activ hasi sérvkötő, adaptálható (Ortoprofil)

Az eszköz rendeltetése:

Hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv esetén. A has és a hasfal kóros elváltozásainak korrigálására szolgál. Segít a hasfal megtartásában és a hasüri szervek megfelelő helyen tartásában.

Kialakult hasi sérv esetén, gyenge hasfali izomzat, hasfali műtétek esetén ajánljuk. Megakadályozza, hogy a hasfal felszakadjon.

A termék kiválasztása előtt mindenképpen konzultáljon szakemberrel.

Anyaga vászon.

A termék főbb részei:

A termék gumis bordás szövetből készül, amelyet tépőzárral lehet rögzíteni.

Alkalmazás, használat:

A termék méretsorozatos. A kiválasztáshoz kérje gyógyászati segédeszköz forgalmazó segítségét. A sérvkötőt egyszerűen körbe kell vezetni a hasfalon és hátul összekapcsolni a tépőzárral. A felvétel előtt a sérvet vissza kell helyezni, amelyet legmegelőbb, ha fekvő helyzetben végez. A sérvkötőt olyan szorosra kell húzni, hogy fájdalommentesen biztosítsa a párna illeszkedését a sérvkapura. Amennyiben sztómával is rendelkezik, kérje a forgalmazó tanácsát. Éjszaka lehetőleg ne viselje.

Karbantartás, állagmegóvás:

A termék csak kézzel mosható, alacsony fokon vasalható, fűtőtesten nem szárítható. A mosás előtt a pelottát ki kell venni.

Figyelmeztetések:

Nem szabad a sérvkötőt túlságosan szorosra húzni, mert akadályozhatja a belső szervek megfelelő működését.

Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Garancia:

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

Gyártó / Forgalmazó: Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.