

# Használati útmutató



## Activ adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)

### **Az eszköz rendeltetése:**

A termék két oldali sérv (lágycsípő, comb, here) helyén tartását szolgálja.

Anyaga: drill vászon.

### **A termék főbb részei:**

A termék pántokból és un. pelottából (nyomópárna) áll, amely a sérvet a helyén tartja.

### **Alkalmazás, használat:**

Fehérnemű fölött kell viselni. A sérvet először vissza kell helyezni, amelyet fekvő helyzetben végezzen. A pelottát a sérvkapura kell helyezni, majd a sérvkötő rögzítőjét a derékon végigvezetve a tépőzárral rögzíteni kell. A pelottát alulról a combok között végigvezetett rögzítő biztosítja.

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

A termék csak kézzel mosható, alacsony fokon vasalható, fűtőtesten nem szárítható. A mosás előtt a pelottát ki kell venni.

### **Figyelmeztetések:**

Nem szabad a sérvkötőt túlságosan szorosra húzni, csak annyira, hogy a sérvet biztonságosan a helyén tartsa.

Csak abban az esetben használható, ha a sérvet teljesen vissza lehet helyezni. Első ellátásnál kérje orvosi személyzet segítségét a helyes használat elsajátításához.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyeztet a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.

---

### Jótállási jegy

**Kiadás helye:**

**Kiadás ideje:**

**Gyártási szám:**

**P.H.**

A termékre az Ortoprofil Kft., a 151/2003 (IX.22) korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról értelmében 12 hónap jótállást vállal, amelynek kezdete a kiszállítás / átadás napja. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait. Jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti.