

# Használati útmutató



## Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg alatt Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg felett

### **Az eszköz rendeltetése:**

Felfekvés megelőzésére kerekesszéket használó, érzéskieséssel nem rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek. Alkalmazható kerekesszékben és fotelben egyaránt. A felületi kiképzések tehermentesítik a decubitus miatt fokozottan érzékeny területeket. Kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges. Hatásmechanizmusa azon alapszik, hogy a nyomást egyenletesen osztja el az ülőfelületen, ezáltal fenntartható a megfelelő vérkeringés.

A párna poliuretán hab anyagból készül. A huzat vászon anyagú.

### **Alkalmazás, használat:**

Az eszköz sík fele kell, hogy lefelé legyen. A megfelelő higiénia érdekében ajánlatos a párnára huzatot húzni.

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

A párna kézzel mosható semleges mosószerrel. Otthoni körülmények között a matracot fürdőkádban, bő vízzel, bármilyen fertőtlenítő tisztítószerrel kimoshatjuk. Igen lényeges az alapos öblítés. Legalább egy éjszakára hagyjuk a fürdőkádban kifolyni belőle a vizet, utána lehet szellős helyre téve szárítani. Az ülőpárna huzattal együtt tüskéivel befelé összetekerve, összekötve mosógépben max. 60 fokon mosható.

Szárítása sugárzó hőtől távol. Intézményi körülmények között a párnát önmagában autoclavban 120 fokon 20 percig lehet sterilizálni.

### **Figyelmeztetések:**

Használatkor vegye figyelembe a beteg súlyát, mert más anyagsűrűségű párna kell a 70 kg alatti és a 70 kg feletti betegeknek.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használt esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### **Garancia:**

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.