

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetészerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

Kiszolgáló hely bélyegzője

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



GYSGY REHA Kft. 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Tel: 329-0026, 330-7773, Fax: 330-7770

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Adaptált fűző

Típus:

Méret:

- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | F-23 | <input type="checkbox"/> | 1 - 70 |
| <input type="checkbox"/> | AF-18 | <input type="checkbox"/> | 2 - 75 |
| <input type="checkbox"/> | AF-19 | <input type="checkbox"/> | 3 - 80 |
| <input type="checkbox"/> | AF-20 | <input type="checkbox"/> | 4 - 85 |
| <input type="checkbox"/> | AF-22 | <input type="checkbox"/> | 5 - 90 |
| <input type="checkbox"/> | AF-23 | <input type="checkbox"/> | 6 - 95 |
| <input type="checkbox"/> | AF-24 | <input type="checkbox"/> | 7 - 100 |
| <input type="checkbox"/> | AF-25 | <input type="checkbox"/> | 8 - 105 |
| | | <input type="checkbox"/> | 9 - 110 |
| | | <input type="checkbox"/> | 10 - 115 |
| | | <input type="checkbox"/> | 11 - 120 |

1. Általános ismertetés, használat:

F-23 gerincfűző feladata a ágyéki és a derék tájéki gerinc megtámasztása, mozgás biztosítása mellett, alkalmazhatók továbbá tartási hibák korrekciójára, idősebb korban, kövér, petyhüdt izomzatú egyéneknél.

AF-20 a gerinc ágyéki és lumbális szakaszát tartja, támasztja.

AF-22 erős vászonzól készített medencefűző a gerinc ágyéki és háti szakaszát tartja a hasi rész mellett.

AF-23 ágyéki gerincszakasz rögzítésére szolgál. Elöl alul hasemelő van, melyhez csípőszorító öv csatlakozik, hátul acél merevítés van.

AF-24 Medencerögzítő fűző a testvonalát követő merevítőkkal van ellátva.

AF-25 elöl a szeméremcsonttól a mellkas közepéig, hátul a lapocka alsó széléig ér. 2 db vállhevedert kapcsok segítségével rögzítjük.

2. Felvétele és használata:

A fűző felvételét mindig fehérmű, trikó, alsóing fölé, de alsónadrág, bugyi alá álló helyzetben célszerű elvégezni.

Az előzetesen lazára befűzött fűzőt úgy kell felvenni, hogy a fűzős rész vagy a tépőzár hátul a gerinc vonalába vagy a test mellett oldalra kerüljön. Ezután a fűzőszinórt a két végén a szükséges méretig meghúzva, illetve a tépőzárakat a hátrészen meg kell kötni, illetve húzni és rögzíteni. Nem célszerű a rögzítést előrehozva elöl megkötni, mert bevágást, szorítást okozhatnak.

A rögzítés után kell a hasemelőt felcsatolni úgy, hogy a hasat alulról felfelé emelje és kényelmes jó tartást biztosítson.

Az eszköz felvétele során hangsúlyozottan ajánljuk a korrekt felhelyezést és a beállítást, mivel akkor érhetjük el a kívánt funkciót.

Amennyiben az eszköz nem megfelelően lett kiválasztva, esetenként negatív hatást válthat ki, vérkeringési, vagy más kellemetlen problémákat okozhat.

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal (pl. alapanyag sérülése, funkció csökkenés), azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal, és/vagy az eszközt kiszolgáló céggel.

Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja.

TILOS!

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszköz fűzését és a hasemelőt túl szorosra állítani, mivel belső vagy külső elváltozásokat okozhat.

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

Figyelem!

A fűzőt éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!

3. Anyag

A fűző vászonzól készült oldalt gumiszövet betéttel. Záródás fűzéssel ill. tépőzárral történik.

Az ortézisben felhasznált anyagok bevizsgálásra kerültek, és viselésre alkalmasnak minősítették. Az eszköz elkészítésekor magas műszaki és minőségi követelményeket állítottunk, amelyek biztosítják a megfelelő minőséget.

Az eszköz kialakítása megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek.

4. Tisztítás

A mosás 40°C- nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a benne maradt mosószer az anyag szerkezetét lágyíthatja, illetve esetenként bőrirritációt okozhat. Mosás után alaposan ki kell szárítani.

Vasalni, centrifugálni, forró fűtőtesten szárítani tilos!

Csak kézzel mosható!



Figyelem: ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, tartósan napfénynek mert károsodhat az anyag!

5. Szavatosság:

A GYSGY REHA Kft. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági és jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

6. Nyilatkozat

A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17) EüM orvostechikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártás időpontja:

Min. Ell.



**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI!**