

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

*Kiszolgáló hely bélyegzője*

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

### Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



**3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.**

**46/508-283**

**3300 Eger, Knézich Károly u. 20.**

**36/320-826**

**2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.**

**35/300-224**

**3900 Szerencs, Bekecsi út 10.**

**47/560-130**

**3600 Ózd, József Attila u. 31/A**

**48/569-239**

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### AF-18

## Medenceszorító öv

Méret táblázat

Méret sorozat	Derékméret cm-ben
<b>XS</b>	<b>60-75</b>
<b>S</b>	<b>70-95</b>
<b>M</b>	<b>90-105</b>
<b>L</b>	<b>100-115</b>
<b>XL</b>	<b>110-125</b>

## **1., Általános ismertető:**

A merevítőkkal ellátott, tépőzárral rögzíthető bordás gumiszövetből készített medenceszorító öv a medence, has, alhas és a gerinc ágyéki és háti szakaszát tartja, rögzíti, illetve emeli az elváltozás jellegének megfelelően. Alkalmazása függ a betegségtől. A tartási hibák korrekcióját is elősegíti.

## **2., Javallat:**

Alkalmazása függ a betegségtől – így nemcsak a medencegyűrű összeszorítását, a has emelését, az ágyéki gerinc megtartását, a háti gerincrögzítést, hanem tartási hibák korrekcióját is elősegíti.

## **3., Felvétele és használata:**

A medenceszorító öv felvételét álló helyzetben kell végezni. A megfelelő magasságban a derékra helyezük, majd elöl a tépőzárakat a kívánt feszesség beállításával összekapcsoljuk. Első viseléskor a test fokozatos hozzászoktatása érdekében csak 1-1 órára vegyük fel a terméket.

### **TILOS!**

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.  
Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

### **FIGYELEM!**

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal és/vagy az eszközt kiszolgáltató céggel.


Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja.

A medenceszorító övet éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!

## **4., Tisztítása:**

A medenceszorító öv tisztítása kézzel, langyos vízben, semleges tisztítószerrel történhet. Gépi mosásuk az összeállításukhoz használt merevítők miatt nem ajánlott. Szárítás kifektetett állapotban történhet.

**Centrifugálni, vasalni tilos!**

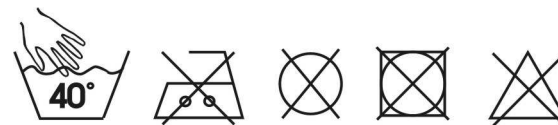

## **5., Szavatosság:**

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

## **6. Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat:**

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechnikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG  
MEG KELL ŐRIZNI !**

