


• BIOPFIT 17

Tépőzáras medenceöv (gumiszövetes)

Méretvétel:

I	85-90
II	90-95
III	95-100
IV	100-107
V	107-115
VI	115-125
VII	125-135
VIII	135-145

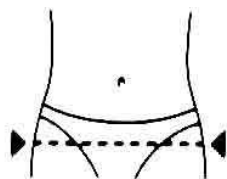

ISO 9001:2015

Eszköz kihordási ideje: 12 hónap



ORTETIKA KFT.

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 149.
Tel.: (26) 331-201, (26) 331-145, (26) 331-171
Fax: (26) 530-319
E-mail: ortetika@t-online.hu
www.ortetika.hu



Javaslat:

- Lumbális porckorong elfajulás, elhasználódás kezdeti szakaszában érdemes rendelni.
- Instabil gerincnél, hosszabb állással, emeléssel, hajlongással vagy ülésel járó terhelések esetén.
- Porckorongsérv műtétek után.

Termék felvétele:

A medenceöv felvétele mindig ruha alá történjék.

Az övet körbevezetjük a derékon, megfelelő mértékig megfeszítjük, majd a tépőzár összenyomásával rögzítjük a hason. Ahhoz, hogy a termék hatása megfelelő legyen, felvételkor erőteljesen meg kell feszíteni az övet.

Az öv levételekor a tépőzárát ajánlott összezárni, hogy ne telítődjön idegen anyaggal.

Kezelési útmutató:

Tisztítás idejére a műanyag merevítőket kivesszük, s a tépőzárát összezárjuk.

Mosása kézmeleg vízben, enyhébb hatású mosószerrel.

Mosógép és centrifuga használata nem ajánlott.

Nem vasalható.

Vegyileg nem tisztítható.

Anyaga:

76 % poliamid

13 % pamut

11 % gumiszál