

Használati útmutató



Activ medenceszorító öv, bordás gumiszövetből, megerősített tépőzárral

Az eszköz rendeltetése:

A medenceszorító övet a lumbális és sacrális gerincszakasz krónikus megbetegedési esetén, a gerincszakasz támasztására, porckorong károsodása, discopátia, csigolya csúszása, kizületi arthosis, nagyfokú megterhelés esetén használhatjuk. A termék kifejezetten erős anyagból készült, így azoknak ajánljuk, akik nagyobb csípőbősséggel rendelkeznek, vagy kövérebbek az átlagosnál.

Lumbago, postdissectomias szindróma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione.

Alkalmazás, használat:

A megfelelő méret kiválasztása után, az ortézist úgy helyezzük fel, hogy a merevítő, a gerinc lumbális szakaszára kerüljön, elől a has közepén tépőzárral rögzítve használjuk.

Karbantartás, állagmegóvás:

40 C fokos vízben, semleges mosószerrel, vasalni, vegytisztítani tilos.

Figyelmeztetések:

A túlságosan szorosan viselt öv a belső szerveket nyomhatja, így ne viselje huzamosabb ideig.

Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használt esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártó / Forgalmazó: Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.

Jótállási jegy

Kiadás helye:

Kiadás ideje:

Gyártási szám:

P.H.

A termékre az Ortoprofil Kft., a 151/2003 (IX.22) korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról értelmében 12 hónap jótállást vállal, amelynek kezdete a kiszolgálás / átadás napja. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait. Jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti.