

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetészerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

*Kiszolgáló hely bélyegzője*

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

### Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



**3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.**

**46/508-283**

**3300 Eger, Knézich Károly u. 20.**

**36/320-826**

**2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.**

**35/300-224**

**3900 Szerencs, Bekecsi út 10.**

**47/560-130**

**3600 Ózd, József Attila u. 31/A**

**48/569-239**

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### AF-20

## Rugalmas törzsfűző egyenestartóval

### Méretábrázat

Méret sorozat	Derékméret cm-ben
XS	60-75
S	70-85
M	80-85
L	90-105
XL	100-115
XXL	110-125

## 1 Általános ismertető:

A fűző elasztikus anyagból készül. A bőségszabályzása elől a hason, tépőzárakkal történik. A derék tájékot X alakú merevítés erősíti. A hát egyenes tartását a hátközépen elhelyezett és 2-2 db rugalmas műanyag merevítővel kierősített egyenestartó rész biztosítja. A háti merevítő sínek közül a gerinc melletti felnyúlnak a háti csigolyáig. A fűző hátoldaláról 2 vállheveder halad előre a vállakon át hátközépen keresztezve, majd a mellkasi részen záródva.

## 2 Javallat:

A háti és ágyéki gerinc rögzítése, megtámasztása, nagyobb fokú mozgás biztosítása mellett. Háti-ágyéki spondylosis, discopathiák, tartási hibák korrekciója idősebb korban, kövér, petyhüdt izomzatú egyéneknek. Gerinc degeneratív elváltozásai esetén.

## 3. Felvétele és használata:

A medenceszorító öv felvételét álló helyzetben kell végezni. A megfelelő magasságban a derékre helyezzük, majd elől a tépőzárakat a kívánt feszesség beállításával összekapcsoljuk. Ez után felhelyezzük a vállhevedereket úgy, hogy hátul keresztezve a vállakon át előrevezetjük, majd a mellkasi részen a tépőzár segítségével összezárjuk. Első viseléskor a test hozzászoktatása érdekében csak 1-1 órára vegyük fel.

***A medenceszorító övet éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!***


### **TILOS!**

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

## 4. Tisztítása:

A medenceszorító öv pamutszállal bevont bordásgumi szövetből készült. Tisztításuk kézzel, langyos vízben, semleges tisztítószerrel történhet. Gépi mosásuk az összeállításukhoz használt hátacélok miatt nem ajánlott. Szárítás kifektetett állapotban történhet. **Centrifugálni, vasalni tilos!**

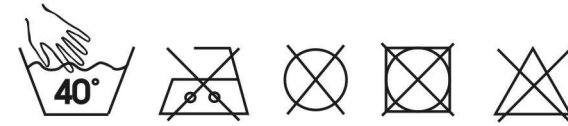

## 5., Szavatosság:

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

## 6. Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat:

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG MEG KELL ÓRIZNI !**

