

Használati és tisztítási útmutató

RB-23 ágyékfűző

Leírás:

A fűző hátrésze dupla pamutvászonból készül. A hátrészt a gerincoszlop két oldalán 4-4 fémpálcával erősítjük meg, mely a hát lapocka alatti részétől a gerinc alsó szakaszáig stabilan támasztja a derekat. Az oldalrészt elasztikus gumiból készítjük. A fűző elejérsze szintén pamutvászonból készül. A has alsó felén has emelőt helyeztünk el, melyen a derék fölött elhelyezett övet tépőzárral rögzítjük. A fűző a medence stabil tartását biztosítja.

A segédeszközt porckorongsérv porckopás, elmeszesedés, folyamatos erős derékfájdalom esetén javasolják.

Ajánlás:

Háti és derék gerincszakasz megbetegedéseinek kezelésére, hosszabb idejű állás vagy nehéz fizikai munka, emeléssel járó megterhelés esetén.

Használati útmutató:

A megfelelő méret kiválasztása után eleje közepén tépőzárral zárjuk be a fűzőt. A deréköv beállításával a hát stabil megtámasztását fokozhatjuk. A merevítő pálcákat a hátrészen adaptáljuk.

Figyelmeztetés:

A fűző viseléséhez fokozatosan szokjunk hozzá. A viselés idejét lassan növelve.

Méretezés:

S,M,L,XL

Tisztítási útmutató:

A terméket 40 C-os, semleges mosószeres vízben végezze. Centrifugázni, vasalni tilos! Szárítása: fektetve történjen.



A termék kielégíti a 4/2207 (III.17). EüM rendelet alapvető követelményeit.

Gyártja és forgalmazza:

