

# Használati útmutató



## Activ csuklórögztő (Ortoprofil)

### **Az eszköz rendeltetése:**

Az eszköz a kézfej és a csukló ízületeinek gyulladással járó állapotai (ínhüvelygyulladás, ízületi gyulladás), ficam, részleges ficam esetén tehermentesítő, kímélő funkciót lát el. Felhasználható törések esetén a gipsz levétele utáni felépülő időszakban is, mivel a tisztálkodás alkalmával levehető. Támasztja és melegíti is az ízületet, így elősegíti a gyógyulást. Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, postoperatív állapot.

A csuklórögztő anyaga gumiszövet, a merevítők fémből, illetve műanyagból készülnek.

### **Alkalmazás, használat:**

A terméket a megfelelő oldali kézre húzva kell használni a tépőzárakkal rögzítve. A merevítőknek a tenyér felé, kell nézniük.

### **Méretek:**

A megfelelő méret a csukló körmérete alapján választható ki  
S: 14-16 cm            M: 16-18 cm            L: 18-20 cm

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

A csuklórögztő kézzel mosható. A merevítőket a tisztítás előtt ki kell venni. Szárítás szobahőmérsékleten.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyeztet a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### **Garancia:**

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Forgalmazó és gyártó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.