

Chrisofix®



CE

EU patent: 087 46 07

PALMÁRIS ALKARSÍN (ORTÉZIS) HÜVELYKTÁMASSZAL

MÉRETEZÉS	A KÉZ HOSSZA	REFERENCIASZÁM	
		jobb	bal
XS (extra kicsi)	<16,5 cm	733 111 178	743 111 178
S (kicsi)	16,5-17,5 cm	734 111 178	744 111 178
M (közepes)	17,5-19 cm	736 111 178	746 111 178
L (nagy)	19 < cm	738 111 178	748 111 178

INDIKÁCIÓK

- Elsősegély
- A csukló, a kéz és az ujjak kombinált rögzítés vagy immobilizálása (Forte) sérülések (pl. disztorzió), műtét vagy gipszelés után, esetleg helyett.
- A csukló, a kéz és az ujjak íngyulladásának és degeneratív elváltozásainak konzervatív kezelésére pihentető sínként.
- Műtétet követő rehabilitációs periódusra.
- Adjuvans terápiaként Sudeck dystrofiában.

FELHELYEZÉS

- Formázza meg a sánt a nem sérült kézen, csuklón és alkaron.
- Állítsa a csuklót a kívánt pozícióba.
- Helyezze az alkart a palmáris oldalával az előformázott sínbe.
- A sánt óvatos nyomással formázza a kézre és az alkarra.
- Rögzítse a sánt a kézre az ujjakon, kézfejen és alkaron átvélő tépőzárak szalagok segítségével.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A sánt első felhelyezését (kivéve elsősegély esetén) szakképzett személy végezze.
- **A sánt nem sterilék, nyílt sebre nem helyezhetők.**
 - Az elsősegély nyújtás esetét kivéve, a belső textilbevonat nélküli sánt csak bekötözött testrésze helyezhetők. Egyéb esetben a sánt szállított bélés használandó, ha van ilyen, vagy egyéb tetszés szerinti anyag, amellyel a sérült testrészt felöltöztetik (pl. csőkötyszer).
 - Az előformázott sánt közvetlenül a sérült testrésze helyezhetők, ráilleszhetők. A hajlításhoz és alakításhoz ellennyomás szükséges. Csak a durvább alakítások nem végezhetők el sérült testrészen, ezeket egy megfelelő modellen (pl. nem sérült testrésze) kell végrehajtani.
 - Finomabb kiigazítások és utánállítások – pl. a lágyrészek duzzanatának csökkenése után – a sánt eltávolítása nélkül is elvégezhetők.
 - Az éles fémszélék által okozott sérülések elkerülése érdekében, a sánt csak hajlítással, óvatos nyomással igazítsa a testrészehez, nem vágással! Csak azok a sánt rövidíthetők vágással, amelyeken varrás jelzi azt a levágható részt, amely nem tartalmaz alumíniumot.
 - A sántet tetszőleges anyaggal vagy a sánt szállított szalagokkal lehet rögzíteni az adott testrészehez.
 - A sánt túlzottan gyakori nyitása és csukása – amennyiben lehetséges – kerülendő, mivel ez csökkentheti az alumínium mag stabilitását.
 - A Chrisofix® sánt és bélés semleges mosószeres vízzel moshatók. **A szárításhoz mikrohullám, infravörös hullám vagy ruhaszáritó használata tilos!** A sánt (hajlított állapotban is) mosósákba téve 30°C hőfokon mosógéppel is moshatók, alacsony fordulattal centrifugálhatók. Ilyenkor - a többi ruha sérülésének elkerülése végett - a tépőzárak minden esetben „zárt” állapotban legyenek.
 - Azok a sánt, amely belső felülete nem textilbevonatú, kémiai úton fertőtleníthetők (p.l. Meliseptol-lal vagy más kation aktív tenzid tartalmú fertőtlenítővel) és új szalagokkal és béléssel ismételtelen felhasználhatók akár több beteg által.
 - A nagyobb sánt/ortézisekhez külön is rendelhető kiegészítő erősített pánt (pl. Spasticus Paresis esetén) és/vagy bélés frottír bevonattal.

07. 2011

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



Manufacturer: CHRISOFIX AG. CH-8201 Schaffhausen, P.B. 3028
Tel: 00-41-52-6701160 Fax: 00-41-52-6701163
e-mail: info@chrisofix.ch www.chrisofix.ch
Production: ORKRISZ Kft. H-1239 Budapest, Grassalkovich út 272.
Tel.: 00-36-1- 2871056 Fax: 00-36-1-2890232