

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetészerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

Kiszolgáló hely bélyegzője

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



GYSGY REHA Kft. 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Tel: 329-0026, 330-7773, Fax: 330-7770

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kéz-csukló-könyök ortézisek

Típus:

- AV-21
- AV-310 (jótállás)
- AV-311 (jótállás)
- Tenyértámasz
- AV-441 (jótállás)
- AV-45 (jótállás)
- AV-46 (jótállás)

Méret:

- 1 - S
- 2 - M
- 3 - L
- 4 - XL
- 5 - XXL

1. Általános ismertetés:

A segédeszköz adaptálható kivitelben készül. Akkor kerül alkalmazásra, ha a felsővégtag ízületeit funkcionális probléma, betegség miatt tehermentesíteni, rögzíteni vagy mozgáspályáját csökkenteni szükséges. A testen történő rögzítést hevederek, illetve pántok biztosítják. A testtel érintkező műanyag felületek béleléssel vannak ellátva a kényelmesebb viselés miatt.

2. Felvétele és használata

Az eszköz felvételének módját és használatát az átadó szakember és/vagy szakorvos tanítja meg.

A felvétel során először kioldjuk a rögzítő pántokat, majd az ortézist a végtag megfelelő részére felhelyezzük. Ügyelni kell a megfelelő beállításra, hogy a sínek és ízületek megfelelő magasságban helyezkedjenek el, majd a hevederekkel rögzítjük.

Az eszköz beállításait nem szabad a beállított méretekhez képest megváltoztatni.

Az eszköz beállításait minden esetben a rendelő szakorvos határozza meg és viselési javaslata alapján alkalmazható.

A felhelyezés során hangsúlyozottan ajánljuk a korrekt felhelyezést és a beállítást, mivel akkor érhetjük el a kívánt funkciót.

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a viselés során (pl. sínezet működési zavara, alapanyag sérülése, funkció csökkenés), azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal, és/vagy az eszközt kiszolgáló céggel.

Csak orvosi ellenőrzés mellett használható!

TILOS!

Az orvos által meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett készítve.

Figyelem!

Az eszközt éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!

3. Anyag

A fűző felhasznált anyagok bevizsgálásra kerültek, és viselésre alkalmasnak minősítették. Az eszköz elkészítésekor magas műszaki és minőségi követelményeket állítottunk, amelyek biztosítják a megfelelő minőséget.

Az eszköz kialakítása megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek.

Az eszköz hipoallergén anyagokból készült.

Az eszközben felhasznált anyagok:

- fém alkatrészek (sínezetek, ízület)
- textil
- kellékanyagok

A felsorolt anyagok közül nem mindegyik épül be az eszközbe, ennek figyelembe vételével kell a tisztítási utasításokat betartani.


4. Tisztítás

A tisztítás 40°C -nál nem melegebb vízzel semleges mosószerral, kicsavart szivaccsal törölgetve történhet. Tisztítás után alaposan ki kell szárítani, és csak azután lehet ismét használni az eszközt.

Sugárzó hőnek kitenni, forró fűtőtesten szárítani tilos!

Tilos súrolni, csavarni, mivel károsodhat az anyag.

Csak kézzel mosható!

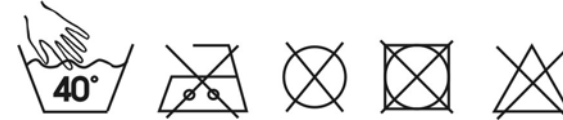

Figyelem: ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, tartósan napfénynek mert károsodhat az anyag!

5. Szavatosság:

A GYSGY REHA Kft. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági és jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

6. Nyilatkozat

A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártás időpontja:

Min. Ell.



**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ÓRIZNI!**