

# Használati útmutató



## Activ fém stabilizálású

### Az eszköz rendeltetése:

Krónikus bokaízületi instabilitás, krónikus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelése. Az ortézis a bokaízület stabilitását, részleges tehermentesítését szolgálja. Különböző sportsérülések, műtét utáni állapot esetén a bokaízület kímélése céljából ajánljuk.

Enyhe vagy súlyos rándulások (funkcionális vagy posztoperatív kezelése), bokatorések (funkcionális kezelés a fizioterápiás szakaszban). Krónikus bokaízületi instabilitás, krónikus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelése. Anyaga bordás gumiszövet fém merevítővel.

### Alkalmazás, használat:

A megfelelő méret kiválasztása után, a bokaortézist a lábra húzzuk. A sarokcsont a kivágáshoz kerül. A fűzőt nem túl erősen meg kell húzni. A panaszok fokozódása esetén értesítse kezelőorvosát.

### Méretvétel:

Lábszár alsó körméret alapján.

Lábszár körméret	Méret
< 21 cm	S
21-23 cm	M
23-25 cm	L
25-27 cm	XL
27 cm <	XXL

### Tisztítás:

Tisztítás: 40 C fokos vízben kézzel, semleges mosószerrel, vasalni tilos, tisztítás előtt a fém merevítőket ki kell venni.

### Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### Garancia:

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.