

## 6. Nyilatkozat

A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártás időpontja: .....  
Min. Ell.



**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A  
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A  
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG  
MEG KELL ŐRIZNI !**



**GYSGY REHA Kft. 1149 Budapest, Pillangó u. 12.**  
Tel: 329-0026,330-7735, Fax: 330-7770  
[www.gysgy.hu](http://www.gysgy.hu), E-mail: [info@gysgy.hu](mailto:info@gysgy.hu)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Boka-láb ortézisek

#### Típus:

- Peroneus emelő
- AJ-270 bokarögzítő
- AJ-271 bokarögzítő

#### Méret:

- 1 - S
- 2 - M
- 3 - L
- 4 - XL
- 5 - XXL

- Oldaliság:  Bal  
 Jobb

## 1. Általános ismertetés:

A segédeszköz adaptálható kivitelben készül. A láb- és boka ízületeinek, lábtőizületi gyulladások esetén, amikor instabil bokaizület ill. laza bokaszalagok, ficamra való hajlama áll fenn, vagy post traumás esetekben, törések után alkalmazható. A fájdalmas mozgást kiiktatva a beteg járóképessé válik. A testen történő rögzítést hevederek, illetve pántok biztosítják.

## 2. Felvétele és használata

Az eszköz felvételének módját és használatát az átadó szakember és/vagy szakorvos tanítja meg.

A felvétel során először kioldjuk a rögzítő pántokat, majd az ortézist végtagra felhelyezzük. Ügyelni kell a megfelelő beállításra, majd a hevederekkel rögzítjük.

Az eszköz beállításait nem szabad a beállított méretekhez képest megváltoztatni.

Az eszköz beállításait minden esetben a rendelő szakorvos határozza meg és viselési javaslata alapján alkalmazható.

A felhelyezés során hangsúlyozottan ajánljuk a korrekt felhelyezést és a beállítást, mivel akkor érhetjük el a kívánt funkciót.

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a viselés során (pl. működési zavara, alapanyag sérülése, funkció csökkenés), azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal, és/vagy az eszközt kiszolgáló céggel.

Csak orvosi ellenőrzés mellett használható!

### **TILOS!**

Az orvos által meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett készítve.

### **Figyelem!**

Az eszközt éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!

## 3. Anyag

Az ortézisben felhasznált anyagok bevizsgálásra kerültek, és viselésre alkalmasnak minősítették. Az eszköz elkészítésekor magas műszaki és

minőségi követelményeket állítottunk, amelyek biztosítják a megfelelő minőséget.

Az eszköz kialakítása megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek. Az eszköz hipoallergén anyagokból készült.

Az eszközben felhasznált anyagok:

- műanyag (lemez, habosított bélés anyag, műgyanta)
- fém alkatrészek (sínezetek, ízület)
- textil
- kellékanyagok


A felsorolt anyagok közül nem mindegyik épül be az eszközbe, ennek figyelembe vételével kell a tisztítási utasításokat betartani.

## 4. Tisztítás

A tisztítás 40°C -nál nem melegebb vízzel semleges mosószerrel, szivaccsal törölgetve történhet. Mosás után alaposan ki kell szárítani.

Vasalni, centrifugálni, forró fűtőtesten szárítani tilos!

Csak kézzel mosható!

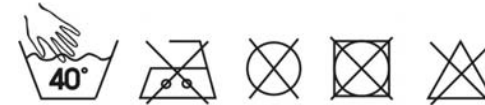

Figyelem: ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, tartósan napfénynek mert károsodhat az anyag!

## 5. Szavatosság:

A GYSGY REHA Kft. a termék rendeltetésszerű használata mellett 12 hónap jótállást biztosít. A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni