
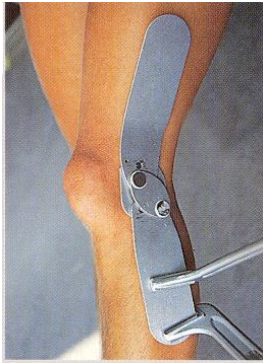


# GENU SYNCRO 6000

A térd természetes mozgását követő, stabil oldalsínrel ellátott térdrögzítő, amely támasztékot biztosít a **térd** különböző eredetű **instabilitásaira**. Ajánlott a sérülés megelőzésére, a térd védelmére, az esetleges baleset vagy műtét utáni kezelésére. **Indikáció:** Nyíl és oldalirányú instabilitás enyhe esetei, arthrózis, arthritis térdízületi hiperextenzió, postoperatív kezelések esetén a még visszamaradt instabilitás Nem ajánlott: jelentős mechanikus instabilitás, súlyos ízületi deformitás esetén

- syncrosoft bőrbarát szivacsos pamuttok, hossza 32 cm
- 10 cm széles rugalmas neoprén pánt
- több tengelyes, szabad ízületes sín
- a tok térd alatt és felett is nyitható
- a sín jól követi a térd mozgását

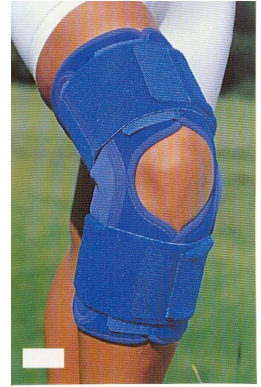

Opció: Egyedileg, méretre készülő, 4 tengelyes sínezettel és 10 cm széles rugalmas tépőzár


A sínek szakember által történő pontos lábhoz igazítása szükséges!

A **sínek tokba történő behelyezésekor** ügyeljen:

1. a síneken található jelölésre
  - KA – a láb külső oldalán levő sín alsó része
  - BA – a láb belső oldalán levő sín alsó része
2. sín ízülete a takaró zsák belsejében lévő kopásgátló lap alá kerüljön, ezzel védve a tokot.

Kérjük jegyezze meg a sínek eredeti helyzetét!

**Tisztítás:** semleges mosószerrel langyos vízben nyomkodással tisztítható. Kicsavarás nélkül fektetve szárítsa!

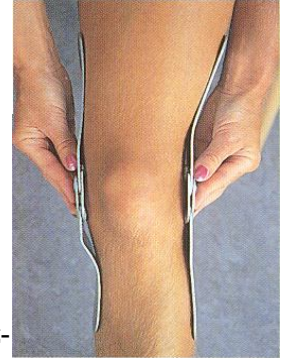

Mosógépben való tisztítás nem javasolt. Mosás előtt az alumínium síneket el kell távolítani a tokból!

## Mellékhatások

Szakszerű használat és viselés esetén a szervezet egészét érintő mellékhatások ez ideig nem ismertek. Azok a gyógyászati segédeszközök – sínek, ortézisek -, amelyeket kívülről a testfelszínre illesztünk, túlzottan szorosan felhelyezve bizonyos pontokon nyomási tüneteket okozhatnak vagy ritkán az ott futó ereket, idegeket összenyomhatják.

## Ellenjavallatok

Beavatkozást igénylő túlérzékenység ez ideig nem ismeretes. Az alábbi betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések a rögzítendő területen, különösen gyulladáshoz vezető tünetek esetén. Ide tartoznak azok a felszakadt hegek is, melyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el.
4. Érzés- és keringéscsökkentések, pld. cukorbetegség (diabetes mellitus)

## Fontos tudnivalók

- A térdörögítőt csak a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően és az ugyanott leírt alkalmazási területeken szabad használni.
- A terméket csak egy beteg kezelésének időtartamára tervezték.
- Szakszerűtlen használat esetén a termék szavatossága elvesz.
- A terméken tilos bármiféle szakszerűtlen átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.
- Amennyiben szokatlan változásokat vesz észre magán (pld. a panaszok fokozódása), haladéktalanul keresse fel orvosát.
- Ha egy időben más terméket is (pld. kompressziós harisnyát) használna, azt előzetesen beszélje meg kezelőorvosával.
- Az ortézis főként mozgás során fejti ki hatását. Hosszabb pihenés idejére (pld. alvás, hosszabb ülés) le kell venni.
- A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok.
- Garanciát az érvényes törvényi rendelkezések alapján nyújtunk.
- Az elhasználdott terméket a háztartási szemétbe dobhatja.

Körfogat cm-ben	MÉRETEK							
	I.	II.	III.	IV.	V.	III.+	IV.+	V.+
Térdközép fölött 15 cm-rel	36-42	39-45	43-50	47-55	52-61	45-54	50-59	53-66
Térdközép nél	30-33	33-36	36-40	40-44	44-49	36-40	40-44	44-49
Térdközép alatt 15 cm-rel	29-33	31-36	34-40	38-44	42-49	34-40	38-44	42-49

EAN kód:

A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni szíveskedjen! **Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el.**

OTH Reg. szám: 36252/2002  
Gyártó/Forgalmazó: LBT Kft.  
1134 Budapest, Dévai u. 11-13.  
Tel: 239-2282, Fax: 340-1309



Méret:	Oldal:
--------	--------

