

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap. Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

*Kiszolgáló hely bélyegzője*

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



**3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.**

**46/508-283**

**3300 Eger, Knézich Károly u. 20.**

**36/320-826**

**2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.**

**35/300-224**

**3900 Szerencs, Bekecsi út 10.**

**47/560-130**

**3600 Ózd, József Attila u. 31/A**

**48/569-239**

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÓTÁLLÁSI JEGY

AJ-421

Térdtámasztó szabályozható ízülettel

### Méret táblázat

| Méret sorozat |
|---------------|
| S             |
| M             |
| L             |
| XL            |
| XXL           |

## **1. Általános ismertetés, használat:**

A készülék neoprén és laminált kelméből készülhet, mely a mozgástartomány limitálására, vagy teljes kiiktatására alkalmas könnyűfém sin vázzal van kiegészítve. Ezért alkalmazható post traumás, illetve post operatív ellátásra egyaránt. Az eszköz körütekintő beállítása, illetve a mozgástartomány orvos által meghatározott mértékének beszabályozása után egyszerűen, tépőzárral felhelyezhető

## **2. Javallat**

Alkalmazható térdízületi instabilitás esetén várhatóan legfeljebb 6 hétig tartó kezelésre. A comb felső harmadától a lábszár alsó harmadáig érő sinvázzal erősített korlátozható mozgástartományú ízülettel ellátott eszköz.


## **3. Felvétele:**

Figyelem! Az eszközt első alkalommal szakember adaptálja, beállítja, és megtanítja annak helyes használatát. Ennek során az ortopédiai műszerész hozzáigazítja a két oldalon futó két sint a térd, comb és lábszár érintett részeinek kontúrájához, ami elengedhetetlen feltétele a pontos működésnek. A mozgástartomány beállítása az orvos utasításai szerint történik, melyet mindkét oldalon el kell végezni. A már beszabályozott térdtok felvételéhez helyezük a tépőzárakat nyitott állapotában, az érintett végtagra, majd csatoljuk össze a párnázat tépőzárait. Ügyeljünk arra, hogy az eszköz ízületi forgáspontja a térd hozzátétőleges forgáspontjában helyezkedjen el. Ezután a rögzítő bandázsokat (a combon illetve a lábszáron) a tépőzár segítségével rögzítsük. Kérjük, hogy amennyiben az eszköz használatával kapcsolatban probléma merülne fel, kérje szakember segítségét!

## **4. Tisztítás:**

Tisztítás kézzel, langyos vízben, semleges tisztítószerrel történhet. Gépi mosása nem ajánlott. Szárítás kifestetett állapotban történhet.

**Centrifugálni, vasalni tilos!**

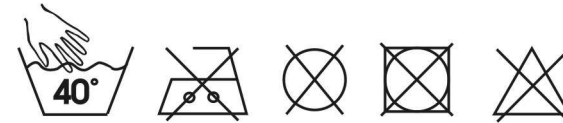

## **5., Szavatosság:**

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

## **6. Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat:**

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG MEG**

**KELL ŐRIZNI !**

