

# Használati útmutató



## Activ hónaljmankó

### **Az eszköz rendeltetése:**

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.

Az eszköz a láb részleges vagy teljes tehermentesítését szolgálja oly módon, hogy a megfelelő oldalon rá lehet támaszkodni. A mankó magassága állítható. Anyaga aluminimum cső, a hónaljtámasz és a fogantyú műanyag.

### **Beállítás, első használat:**

Az első használat előtt a mankó magasságát be kell állítani.

Ez két lépésben történik. Először a mankó magasságát kell beállítani, amihez a rögzítő klipszet ki kell húzni, majd az új pozícióban vissza kell tenni, úgy, hogy a klipsz acél csapja az összes furaton átmenjen.

A mankó magassága akkor megfelelő, ha használat közben a felső támaszték a hónalj alatt van és azt sem alacsonynak, sem pedig magasnak nem érzékeli a használó. A markolat magasságának beállítása a következő lépés. Ehhez a markolatot tartó csavart ki kell csavarni, majd a markolatot a kívánt magasságba állítani és a csavart visszacsavarni. A markolat magassága akkor jó, ha a mankóra támaszkodva keze, kissé hajlított könyökkel könnyen elérhető

Terhelhetőség: 100 kg

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

Az eszköz karbantartást nem igényel.

### **Figyelmeztetések:**

Elkopott botvéggumival a mankó használata veszélyes lehet, hiszen megnő a kicsúszás veszélye. Az elkopott botvéggumira a használatkor hallható kopogó hang, hívja fel a figyelmet.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használt esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### **Garancia:**

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.